


Dokonalá kombinace:

Krytí s technologií Safetac® a Tubifast®

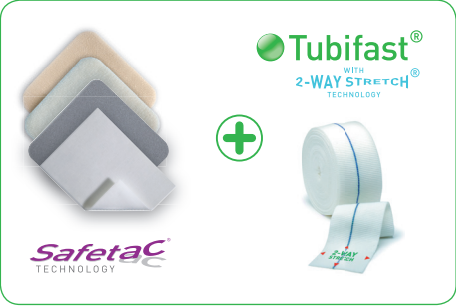

Mextra® Superabsorbent + Tubifast®



www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o.,
Hájkova 22, 130 00 Praha 3.

Mölnlycke Health Care, Tubifast®, Safetac®, Mepilex®, Mepilex® Lite, Mepilex® Transfer, Mepilex® Heel a Mextra® Superabsorbent jsou registrované názvy a loga jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group.
©2016 Mölnlycke Health Care AB.
Všechna práva vyhrazena.
CZWC0190716



Optimální řešení pro fixaci krytí



Elastické tubulární obinadlo

Spolehlivé

- Spolehlivě fixuje krytí na místě bez nutnosti použití sponek

Komfortní

- Bez pocitu tlaku či svírání při nošení
- Úplná svoboda pohybu a pocit pohodlí pro pacienta díky dvoucestnému strečovému materiálu

Praktické

- Snadná a rychlá aplikace
- Lze stříhat a prát
- V několika velikostech pro lepší adaptaci na všechny končetiny

S Tubifastem by se toto nestalo:



Otlaky způsobené příliš silným stažením.



Sklouznutí, protože obinadlo je příliš volné.



Příliš silné zaškrcení.

Tubifast fixuje krytí bezpečně na místě. Nezpůsobuje kompresi ani pocit svírání.



Viskóza, elastan a polyamid

Bez nutnosti použití sponek, špendlíků či lepicích pásek

V několika velikostech pro lepší adaptaci na všechny končetiny bez ohledu na velikost či tvar

Snadná a rychlá aplikace - nastříhat a natáhnout

Dvoucestná strečová technologie zajišťuje pružnost oběma směry pro pocit plný volnosti a pohodlí pro pacienta



číslo výrobku	velikost	obvod končetiny	počet ks v balení	
24 38	modrý	7,5 cm x 10 m	24 - 40 cm	1
24 40	žlutý	10,75 cm x 10 m	35 - 64 cm	1
24 44	fialový	20 cm x 10 m	64 - 130 cm	1
35 56	modrý	7,5 cm x 5 m	24 - 40 cm	1



Lehké tubulární obinadlo s dvoucestnou strečovou technologií

Optimální fixace krytí:


Spolehlivé
Komfortní
Praktické



Hlava



žlutý

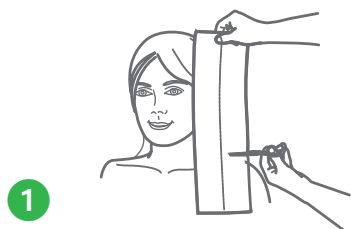

1 Naměřte si délku od konce krku k horní části hlavy, zdvojnásobte naměřenou délku a přidejte ještě zhruba 3-4 cm navíc. Odstříhnete požadovanou délku. Přeložte **Tubifast®** napůl tak, aby byly obě strany stejně dlouhé. 10 cm pod záhybem nastříhnete 4 cm na jedné straně.



2 Přetáhněte **Tubifast®** přes hlavu tak, aby byl obličej v otvoru. Otočte horní část o 360 stupňů a stáhněte dolů jako čepici. Alternativně můžete nejdříve umístit kratší stranu jako čepici a delší část po otočení o 360 stupňů stáhnout dolů.




3 **Tubifast®** je nyní dobře umístěn na hlavě a obvaz pevně sedí.

Hrudník




fialový

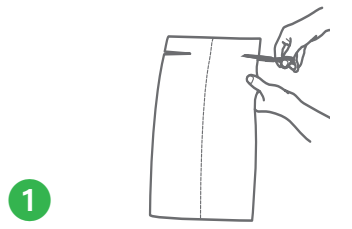

1 Ustříhnete **Tubifast®** v rozsahu vzdálenosti mezi krkem a koncem sedu. Asi 10 cm od horního kraje udělejte zástřih zhruba 3 cm.



2 Navlečte **Tubifast®** přes hlavu a provlečte ruce prostrčenými otvory.

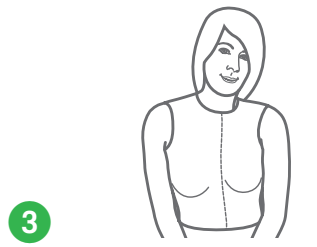


3 Stáhněte **Tubifast®** dolů stejně jako když oblékáte tričko. Takto je možné zafixovat krytí na hrudníku či zádech.

Ruka




Délka rozměru: konečky prstů - zápěstí x2


modrý

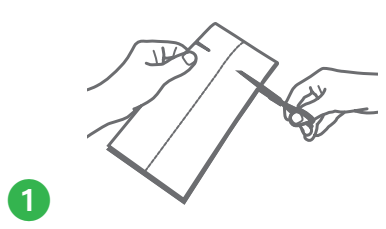

1 Naměřte vzdálenost od konečků prstů k zápěstí a ustříhnete dvojnásobnou délku **Tubifastu**. Přeložte **Tubifast®** napůl, aby byly obě strany stejně dlouhé. Udělejte zhruba 1 cm od horního okraje zástřih z obou stran.

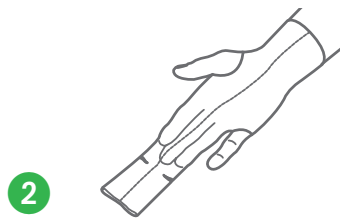

2 Přetáhněte **Tubifast®** přes ruku a zápěstí a protáhněte palec a malíček přes spodní průstřihy.

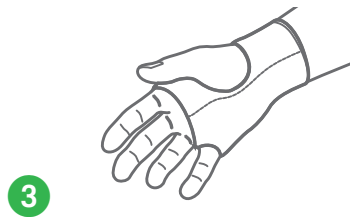


3 Přehněte horní konec **Tubifastu** zpět a provlečte nyní opět palec a malíček přes horní otvory, aby zbylé 3 prsty byly volné.


Oblast hýždí a boků




žlutý

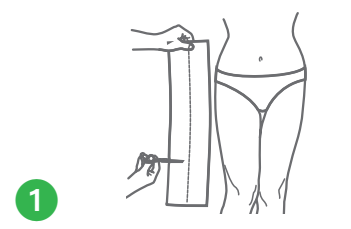

1 Naměřte vzdálenost mezi pasem a kolenem. Odstříhnete požadovanou délku. Od horního kraje nastříhnete 15 cm nebo dostatečně tak, aby se jím provléklo stehno.

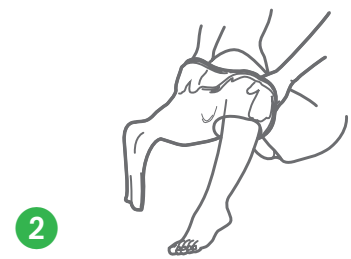

2 Provlékněte poraněnou nohu celým nenastríženým **Tubifastem** a provlékněte druhou nohu nastříženou stranou **Tubifastu**.

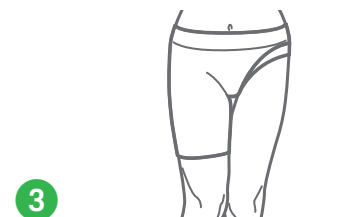


3 **Tubifast®** tímto způsobem bezpečně fixuje krytí v kyčelní a stehenní oblasti.

Noha



modrý

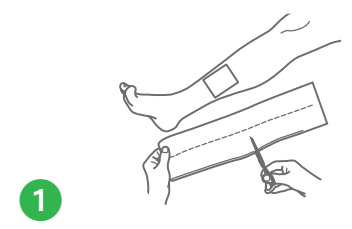

1 Změřte potřebnou délku **Tubifastu** (podle velikosti primárního krytí na ránu), přidejte zhruba 8 cm navíc a ustříhnete.








2 Nastavte jeden konec **Tubifastu** zhruba 4 cm nad primární krytí a poté stáhněte druhý konec směrem dolů.



U specifických indikací může **Tubifast®** fungovat jako dvojitá fixace:

- 1) Před ustřížením naměřit dvojitou délku **Tubifastu**
- 2) Po nastavení lze spodní část **Tubifastu** ohnout a rolovat směrem nahoru tak, aby ohyb byl zhruba 4 cm pod primárním krytím.

Ideální kombinace

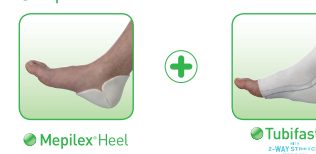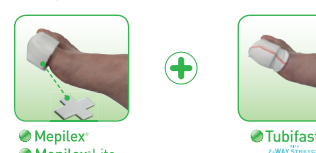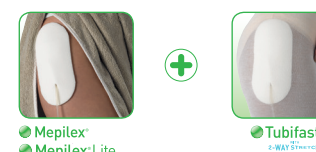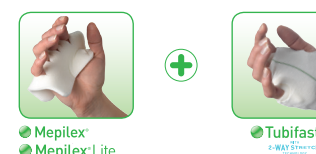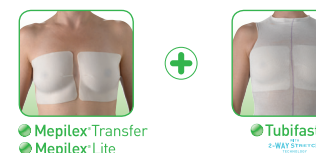

Příklady použití

