

Mepitel® Film

Jedinečná účinnost v prevenci postradiačních kožních reakcí

0%

Nebyl zaznamenán žádný výskyt vlhkých deskvamací.¹

92%

Snižuje výskyt závažných kožních reakcí o 92% v porovnání s krémy.¹

- Chrání pokožku před nežádoucími účinky radioterapie
- Zabraňuje výskytu bolestivých mokvajících lézí
- Neovlivňuje účinky žádného typu ozařování
- Vhodný při diagnózách Ca prsu, hlavy nebo krku

Možné vykazovat jako **ZÚM k výkonu 43050** - Příprava ozařovacího pole aplikací ochranného prostředku

Tento výkon lze vykazovat v centrech vysoce specializované onkologické péče (KOC).

Mepitel Film je ultra tenký, měkký a velmi komfortní transparentní film s adhezivní vrstvou měkkého silikonu s technologií Safetac®, který účinně zajišťuje jemnou a prodyšnou ochranu zranitelné pokožky v průběhu radioterapie.



Bez Mepitel Film

S Mepitel Film

- Nebrání v ozařování a je možné jej nosit/používat po celou dobu radioterapie.
- Snadno se přizpůsobí všem tvarům těla.
- Chrání zranitelnou pokožku před podrážděním a je voděodolný.

REF	velikost	Kód ZÚM
296170	6 x 7 cm	0173116
296270	10 x 12 cm	0173115
296470	10 x 25 cm	0169914
296670	15 x 20 cm	0169915



Mepitel Film používejte od prvního dne radioterapie.

Je vhodné, aby Mepitel Film pokrýval co největší plochu pokožky.

Mepitel Film ponechte na místě tak dlouho, dokud na pokožce drží.

Pro zlepšení ochranného efektu ponechte Mepitel Film na pokožce ještě i 2-4 týdny po ukončení ozařování.



Seznam Komplexních onkologických center najdete na níže uvedeném QR kódu.



Reference: 1. Herst Patries M. et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiotherapy and Oncology 2014.

www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3. tel. +420221890511. Mölnlycke Health Care, Mepitel Film a Safetac jsou registrované názvy a loga jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group. © 2023 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZWC0340123

Mölnlycke®