

ECOLAB®

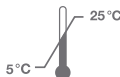
CITROclorex 2% MD



CZ Tekutý dezinfekční přípravek určený k okamžitému použití pro dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, k dezinfekci vnějších součástí a povrchů centrálních i periferních venózních katetrů, které nejsou v přímém kontaktu s injekčními nebo tělními tekutinami.

Zdravotnický prostředek

Mezinárodní pokyny (viz doporučení v EPIC) doporučují použití alkoholového roztoku chlorhexidinu, který obsahuje 2% chlorhexidin diglukonátu a 70% isopropylalkoholu, což je poměr odpovídající složení přípravku CITROclorex 2% MD. Účinný proti bakteriím (včetně TBC), kvasinkám, obaleným virům a Rota virům.

**CE 0297****100 ml e****REF 3074830****4 028163 074849**

Nebezpečí

CZ Obsahuje:

Propan-2-ol
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. **Pouze pro profesionální použití.**



Ecolab Deutschland GmbH · Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein · Germany
Tel.: +49 2173-599-0
Notfallrufnr.: +32-(0)3-575-5555

Distributed by: Ecolab s. r. o. · Voctářova 2449/5,
Libeň · 180 00 Praha 8 · Czech Republic ·
Tel.: +420 296 114 040

www.ecolab.com**LOT****EXP**

3074830F/17JUL20/CZ

CZ Návod k použití: Neředěný produkt naneste na gázu nebo hadřík. Povrch důkladně navlhčete a dbejte na dostatečné a rovnoměrné nanesení po celém povrchu. Nechte zaschnout a neoplachujte.

Varování: produkt nesmí proniknout do vnitřních součástí katétru. V případě, že dezinfekční prostředek přijde do styku s vnitřními součástmi katétru, katétr zlikvidujte. Přípravek CITROclorex 2% MD je nekompatibilní s mýdly a čistícími prostředky obsahujícími aniontové povrchové aktivní látky, chloridy, uhličitany, hydrogenuhličitany nebo jiné anorganické soli, s paraformaldehydem a peroxidem vodíku. Přípravek CITROclorex 2% MD nepoužívejte k dezinfekci zdravotnických prostředků a pomůcek, které nejsou odolné vůči působení alkoholových roztoků.

Složení: Obsah účinných látek ve 100 g produktu: 62 g isopropylalkoholu (ekvivalent k 70% obj.), 2 g chlorhexidin diglukonát.

Pouze pro profesionální použití. Prázdné, čisté a uzavřené obaly předejte oprávněné osobě k zneškodnění. Zbytky produktu: viz bezpečnostní list.

Účinnost (neředěný přípravek)	Doba působení
EN 13727 (baktericidní), čisté & nečisté podmínky EN 13624 (účinnost proti kvasinkám), čisté & nečisté podmínky	1 min
EN 16615 (baktericidní / účinnost proti kvasinkám), čisté & nečisté podmínky	5 min
EN 14348 (tuberkulocidní), nečisté podmínky	30 sec
EN 14476 (obalené viry), čisté & nečisté podmínky	15 sec
EN 14476 (Rota viry), čisté & nečisté podmínky	15 sec