

ALLEVYN Ag NON ADHESIVE *

Třída bezpečnosti: IIb

Neadhesivní polyuretanová pěna se stříbrem .

STERILNÍ K jednorázovému použití Sterilizováno gama zářením
Je-li obal otevřen, či poškozen, přípravek nepoužívejte.
Skladujte v suchu (< 25°C) a chraňte před světlem.

Popis

Obvaz Allevyn Ag Non Adhesive obsahuje integrované částice stříbra a díky tomu má dlouhodobý a efektivní antibakteriální účinek. Obvaz je účinný proti širokému spektru patogenů svojí schopností optimalizovat míru exudátu v ráně minimalizuje riziko macerace pokožky a inovativní design obvazu s utěsněnými okraji účinně ochraňuje proti prosakování.

Použití

Lze použít na středně až silně secernující infikované rány, s částečným a hlubokým poškozením tkáně, např. bércové vředy, dekubity, diabetické defekty, popáleniny 1. a 2.stupně stupně. a odběrové plochy.

Způsob použití

1. Běžným postupem očistěte ránu.
2. Vyberte správnou velikost obvazu tak, aby byl v těsném kontaktu se spodinou rány a zároveň přesahoval přes okraje rány zhruba o 1,5 až 2cm. Ujistěte se, že obvaz skutečně překrývá celou ránu.
3. Obvaz můžete překrýt sekundárním krytím Melolin a fixovat ke zdravé kůži, nebo rovnou obvaz fixujte pomocí obvazu Opsite Flexifix či obvazu Hypafix.

Frekvence výměny obvazu

Frekvence výměny obvazu závisí na typu a stavu rány. U silně secernujících ran se doporučuje provádět převazy každý druhý den. S postupujícím procesem hojení se frekvence výměny obvazu snižuje a postačí převazovat ránu jednou týdně.

Upozornění

Je-li kapacita obvazu vyčerpána, exsudát začne z rány volně vytékat a je nutno obvaz vyměnit.
Neužívejte u pacientů se známou polyuretany a akrylátová lepidla.

Způsob balení

Kód	Velikost	Prodejní jednotka
66800082	5 x 5cm	1balení / 10ks
66800084	10 x10cm	1balení / 10ks

Výrobce

Vyrobeno v Anglii firmou Smith & Nephew Medical limited, Hull HU3 2BN

*Obchodní značka Smith & Nephew

© Smith & Nephew 2007