

**ALLEVYN™ Ag NON-ADHESIVE**

Nepřílnavé hydrocelulární antimikrobiální krytí

Nepoužívejte obsah již otevřeného nebo poškozeného balení.

**Popis**

ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive je absorpční antimikrobiální krytí, které má tři vrstvy: absorpční hydrocelulární pěnové jádro, jež obsahuje sulfadiazin stříbrný (SSD) a nachází se mezi perforovanou neadhezivní vrstvou pro zakrytí rány a vodotěsnou vnější fólií. Krytí slouží jako efektivní bariéra proti mikrobiální kontaminaci a chrání ránu proti invazivním patogenním mikroorganismům. Tím napomáhá rychlejšímu hojení. SSD je látka účinná proti mikroorganismům, které se nachází jak v krytí, tak i v ráně. U exsudujících ran přispívá krytí k zachování vlhkého prostředí v ráně.

**Indikace**

ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive je absorpční antimikrobiální krytí pro ošetření sekundárně se hojících, chronických a akutních, granulujících a exsudujících ran s různou hloubkou, od povrchových až po hluboké rány jako jsou například: dekubity, venózní vředy, diabetické defekty, popáleniny, místa odběru štetu kůže, fungativní/maligní rány a chirurgicky otevřené rány. Allevyn Ag Non-Adhesive lze používat u infikovaných ran. Pokud výrobek použijete na infikované rány, měli byste ránu ošetřovat podle příslušného místního protokolu léčby.

**Kontraindikace**

- Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na sulfadiazin stříbrný nebo sulfonamidy.
- Je známo, že sulfonamidy způsobují jádrový ikterus. Proto by se nemělo krytí na rány ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive používat u těhotných žen, u žen, které předčasně porodily, ani u kojících žen.
- Nepoužívejte ani u nedonošených a novorozenech dětí během prvních měsíců života.

**Preventivní opatření**

- Krytí na rány je určeno jen k zevnímu použití.
- ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive se nesmí používat společně s oxidujícími látkami (např. EUSOL) nebo peroxidem vodíku, protože tyto látky mohou rozkládat absorpční polyuretanovou složku krytí.
- ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive může být nekompatibilní s topickými antimikrobiálními látkami.
- V případě klinické infekce nenahrazuje topické použití stříbra potřebnou systémovou terapii nebo jinou adekvátní léčbu infekce.
- Může dojít k zarudnutí okolní kůže. To může souviset s podrážděním citlivé kůže nebo s delším kontaktem exsudátu z rány se zdravou kůží. Dojde-li k zarudnutí kůže, musí se léčba přerušit.
- Vyvarujte se kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely během elektronického vyšetření jako např. EEG nebo EKG.
- Je-li u pacienta aplikováno krytí ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive během vyšetření MRI (magnetická rezonanční tomografie), může dojít k jeho zahřátí.
- ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive nepoužívejte společně s výrobky na olejové bázi, jako je např. petrolátum/vazelína.
- Krytí ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive není vhodné pro samostatnou aplikaci na rány s kavitami, může se však u ran s kavitami používat jako sekundární krytí.
- Stejně jako u všech výrobků, které obsahují sulfadiazin stříbra, byste měli dodržovat následující preventivní opatření, zejména v případě, že krytí zakrývá velké plochy:
  - buďte opatrní u pacientů se závažným omezením funkce jater nebo ledvin,
  - buďte opatrní u pacientů, u nichž je známo, že trpí deficitem glukózy-6-fosfát dehydrogenázy,
  - účinky systémově podávaných léků se mohou změnit. To se může stát zejména u orálně podávaných hypoglykemik a fenytoinu. U těchto léků doporučujeme sledovat krevní hodnoty, protože se může zvýšit jejich účinek.
- ALLEVYN Ag Heel se nesmí samostatně používat k úlevě od tlaku bez prostředků k úlevě od tlaku.

### Pokyny k použití

- V případě potřeby očistěte ránu podle místního protokolu léčby.
- Vyberte krytí, které je větší než rána.
- Vyjměte krytí ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive z obalu za použití aseptického postupu.
- Položte bílou stranu na ránu a zajistěte dobrý kontakt s ránou. Poté krytí zafixujte filmovým obvazem, náplastí nebo obinadlem.
- Při ošetření exponovaných míst rány zastříhněte krytí do potřebného tvaru.
- ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive se hodí pro použití pod tlakové obvazy.

Ustříhněte krytí na velikost rány a pravidelně kontrolujte, zda neprosakuje exsudát. Pokud exsudát prosakuje, krytí vyměňte.

- Krytí můžete na ráně ponechat až 7 dní, musíte je však vyměnit dříve, pokud jím prosakuje exsudát.

### Výměna krytí

Během raného stádia léčby rány byste měli ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive kontrolovat častěji. Krytí lze na ráně nerušeně ponechat buď po dobu 7 dní nebo jakmile lze pozorovat exsudát, který prosakuje do vzdálenosti 1,5 cm od okraje krytí, podle toho, co nastane dříve. Také zde je nutno zohlednit místní protokoly klinické léčby.

### Odstranění krytí

K odstranění krytí ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive odstraňte nejdříve fixační obvaz nebo obinadlo a krytí sejměte z rány.

### Balení:

| Kód      | Rozměry               | Počet ks v balení |
|----------|-----------------------|-------------------|
| 66800082 | 5 cm x 5 cm           | 10                |
| 66800084 | 10 cm x 10 cm         | 10                |
| 66800087 | 15 cm x 15 cm         | 10                |
| 66800090 | 20 cm x 20 cm         | 10                |
| 66800098 | Heel 10,5 cm x 13,5cm | 5                 |

### Výrobce:

Vyrobila společnost Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN , Anglie.

Ochranná obchodní známka Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2008



NON-ADHESIVE Nepřilnavé



Sterilizováno gama zářením



Pro středně až silně secerující rány



Nepoužívejte opakovaně



Skladujte v suchu (< 25°C)



Chraňte před slunečním zářením



Pozor, čtěte příbalový leták