

**Označení**

ALLEVYN[®] Gentle Border je hydrocelulární pěnový obvaz s přilnavým silikonovým gelem, který zajišťuje optimálně vlhké prostředí pro hojení mírně a silně exsudujících ran. Silikonová vrstva drží jemně na citlivé pokožce a usnadňuje přikládání, opakované přiložení a odstranění. Obvaz je opatřen absorpčním pěnovým polštářkem. Vnější prodyšná fólie chrání před bakteriálním znečištěním a je při sprchování odolná. Avšak obvaz by do vody ponořován být neměl.

Předpokládané využití

1. Řízené hojení povrchových, granulujících ran, chronických a akutních exsudujících ran, více či méně hlubokých ran.

Sem patří:

- Proleženiny
- Bércové vředy
- Diabetické vředy na nohou
- Rány po operacích
- Popáleniny prvního a druhého stupně
- Rány po transplantaci
- Kožní praskliny
- Exulcerující rány

U nekrotických a strupem pokrytých ran může být používán společně s gelem INTRASITE.

2. Prevence proleženin na nepoškozené pokožce, mezi jinými proleženiny způsobené zdravotnickým materiálem, jako součást preventivního plánu pro proleženiny.

Varování: Pokud by měl být obvaz používán spolu se zdravotnickým materiálem v blízkosti nosu nebo úst, měli byste být opatrní, neboť zde může vznikat vlhkost a tím může být narušena přilnavost obvazu, který tak může sklouznout.

Blíží informace naleznete na stránkách:

www.allevyn.com

Návod k použití

1. Místo aplikace očistěte. Dbejte na to, aby byla okolní pokožka čistá a suchá a nevykazovala nadměrné odlupení.
2. Zvolte vhodnou velikost obvazu. Zajistěte, aby absorpční polštářek zakrýval celou ránu nebo část, která má být chráněna. Stupnice na sáčku slouží jen jako orientační pomůcka.
3. Odstraňte první ochrannou fólii a připevněte přilnavou stranu obvazu na pokožku. Při použití obvazu na oblast křížové kosti umístěte jeho úzký konec minimálně 2 cm nad análním svěračem, pak uhladte náplast na křížové kosti.
4. Odstraňte zbytek ochranné fólie/ochranných fólií. Obvaz uhladte. Při použití u ran zajistěte, aby absorpční polštářek ránu zakrýval.

Obchodní sortiment

Č. Obj.	Rozměry	ks/balení
66800269	7,5cm x 7,5cm	10
66800900	10cm x 20cm	10
66800272	12,5cm x 12,5cm	10
66800273	17,5cm x 17,5cm	10
66800897	na křížovou kost 16,8cm x 17,1cm	6
66800898	na křížovou kost 16,8cm x 17,1cm	10

Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hesse Rd, Hüll HU3 2BN Anglie.

© Ochranná známka společnosti Smith&Nephew © Datum vydání 08/2019



Sterilizováno
ethyloxidem



Nepoužívat, pokud
je balení již otevřené
nebo poškozené



Jen pro jedno použití



Dodržujte návod
k použití



Uchovávejte v suchu
[<25°C]



Varování



Nevystavujte
přímému
slunečnímu světlu

5. Uhladte přilnavé okraje. Zajistěte, aby nevznikaly faldy, které by mohly narušovat utěsnění. V případě potřeby může být obvaz nově umístěn. Další pokyny pro použití v oblasti paty a křížové kosti naleznete znázorněné na sáčku nebo krabičce od obvazu.

Pozorování při použití na neporušené pokožce: Z důvodů prevence proleženin je nutné často kontrolovat, zda pokožka nevykazuje poškození tlakem. Za tímto účelem odkryjte jeden růžek obvazu, zkontrolujte a obvaz nově přiložte.

Odstranění: Zvedněte jeden růžek obvazu a pomalu kompletně stáhněte.

Četnost výměny

Obvaz často kontrolujte. Obvaz může zůstat na pokožce až 7 dní, kromě oblasti křížové kosti, v které mohou obvazy zůstat až 5 dní. Obvazy by měly být vyměňovány podle stavu rány a okolní pokožky, nebo pokud není vidět výpotek případně výpotek blížící se k okraji obvazového polštářku na 0,5 cm – podle toho, co nastane rychleji. Rozhodnutí o době výměny by mělo podléhat klinickému hodnocení a místním protokolům pod odborným vedením lékařského personálu.

Bezpečnostní opatření

- Pokud je obvaz používán s jiným zdravotnickým materiálem v blízkosti nosu nebo úst, měli byste být opatrní, neboť zde může vznikat vlhkost a tím může být narušena přilnavost obvazu, který tak může sklouznout.
- Neponořujte obvaz do vody.
- Oxidační prostředky jako roztoky chlornanů (např. EUSOL) nebo peroxid vodíku nesmí být použity, protože mohou snížit absorpční schopnost obvazu.
- Přerušete použití, pokud se objeví zarudnutí pokožky nebo náznak senzibilizace.
- Použití obvazu ALLEVYN Gentle Border jako součást programu profylaxe proti vzniku proleženin nevyklučuje nutnost nadále rozvíjet a plnit objemný plán prevence proleženin (pravidelné obracení, přiměřený povrch pro kontakt s pokožkou a péče o pokožku).
- Vzhledem k jemnému lepidlu není tento obvaz použitelný pro upevnění jiných zdravotnických nástrojů na tělo pacienta.
- Použijte jen jednou, jinak by při použití u více než jednoho pacienta mohlo dojít ke kontaminacím křížové kosti nebo k infekcím.
- Jednou rozbalené, byť nepoužité obvazy nemohou být přechovávány pro pozdější použití.
- Při použití na infikované rány by měly být infekce ošetřeny podle místních klinických protokolů.



2797

10601360 80414