

ALLEVYN Ag GENTLE BORDER

Antimikrobiální hydrocelulární pěnové krytí s adhezivním silikonovým gelem

Nepoužívat, je-li balení otevřené nebo poškozené.

Popis

ALLEVYN Ag Gentle Border tvoří tři vrstvy: Kombinace absorpčního hydrocelulárního jádra z pěnové hmoty, jež obsahuje sulfadiazin stříbra (SSD) a nachází se mezi perforovanou měkkou vrstvou silikonového gelu, přicházející do kontaktu s ránou a vodotěsnou, leč prodyšnou vnější vrstvou. Vrstva ALLEVYN Ag Gentle Border, která přichází do kontaktu s ránou, je opatřena silikonovou vrstvou, která zaručuje při výměně krytí atraumatické odstranění. Kromě toho lze krytí snadno nadzdvihnout a vrátit na místo, aniž přijde o své přilnavé vlastnosti. Krytí nepotřebuje další sekundární fixace a dá se snadno aplikovat a odstranit.

Účinný mechanismus

Trojvrstvá konstrukce ALLEVYN Ag Gentle Border umožňuje dynamické hospodaření s exsudátem, aby se tak v ráně připravilo optimálně vlhké prostředí a zamezilo riziku nástupu macerace. Krytí rány navíc představuje účinnou bariéru proti bakteriální kontaminaci a chrání ránu před invazivními zárodky a umožňuje tak rychlejší hojení. SSD účinně zasahuje proti mikroorganismům, které se mohou vyskytovat v ráně nebo v krytí.

Použití

ALLEVYN Ag Gentle Border je absorpční antimikrobiální krytí pro ošetření chronických, akutních, povrchových i hlubokých, granulujících a exsudujících ran, jako jsou například: dekubitální vředy, bércové vředy, vředy na diabetické noze, popáleniny, rány po transplantaci, prasklá kůže, zvrhovatělé a maligní rány a dehiscentní chirurgické rány. ALLEVYN Ag Gentle Border se může aplikovat u infikovaných ran. Při použití na infikované rány by měla být infekce zkontrolována a ošetřena podle příslušného léčebného protokolu platného v daném místě. U nekrotických nebo strupovitých ran se ALLEVYN Ag Gentle Border může používat společně s INTRASITE gelem. ALLEVYN Ag Gentle Border se hodí k léčbě ran s citlivou kůží.

Kontraindikace

- Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na sulfadiazin stříbra nebo sulfonamidy.
- Je známo, že sulfonamidy způsobují bilirubinovou cefalopatii (jádrový ikterus). Proto by se ALLEVYN Ag Gentle Border neměl používat u žen, které jsou těhotné, prodělaly předčasný porod anebo kojí.
- Nepoužívejte ani u předčasně narozených a novorozenců během prvních měsíců života.

Bezpečnostní opatření

- Jen k zevnímu použití.
- ALLEVYN Ag Gentle Border se nesmí používat současně s oxidujícími látkami (např. EUSOL) nebo peroxidem vodíku, protože ty mohou rozložit absorpční složku polyuretanu.
- ALLEVYN Ag Gentle Border může být nekompatibilní s topicky používanými antimikrobiálními látkami.
- V případě klinické rané infekce nenahradí topická aplikace stříbra nezbytnou systémovou terapii ani jinou adekvátní léčbu infekce.
- Při výskytu zarudnutí nebo alergické reakci je třeba aplikaci přerušit a obrátit se o radu k lékaři.
- Při elektronickém vyšetření, např. EEG nebo EKG, se vyhybejte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.
- Pokud je ALLEVYN Ag Gentle Border aplikován u pacientů během vyšetření MRT (terapie magnetickou rezonancí), mohou mít pocit tepla.
- Nepoužívejte ALLEVYN Ag Gentle Border společně s produkty na bázi olejů, jako je např. petrolatum nebo vazelína.
- U hlubokých ran nebo ran s kavítami nepoužívejte ALLEVYN Ag Gentle Border samotný, lze ho však u těchto ran použít jako sekundární krytí.
- Stejně jako u všech produktů obsahujících sulfadiazin stříbra byste měli dodržovat níže uvedená bezpečnostní opatření, zvláště tehdy, když obvaz kryje velké plochy.
- Pozor u pacientů s podstatným omezením funkce jater nebo ledvin (insuficiencí).

- Opatrně u pacientů s deficitem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy.
- Účinky systémově podávaných léků se mohou měnit. To se může týkat zejména orálně podávaných hypoglykemik a fenytoinu. U těchto léků se doporučuje sledovat hodnoty krevního séra, protože jejich účinek může být zesílen.

Pokyny pro použití

1. V případě potřeby je třeba ránu očistit podle místního protokolu léčby.
2. Vyberte obvaz vhodné velikosti.
3. Očistěte, odmastěte a osušte kůži okolo rány. Překážející ochlupení ostříhejte, aby se krytí dostalo do těsného kontaktu s ránou.
4. Aseptickým postupem odstraňte papír chránící ALLEVYN Ag Gentle Border a obvaz zafixujte na kůži.
5. Krytí nad ranou uhladte a zbývající ochranný materiál stáhněte. Přitom se přesvědčte, že krytí kolem rány dobře sedí.
6. ALLEVYN Ag Gentle Border se hodí na rány na patě, lokti a jiných špatně ošetřitelných částech těla. Při přistřižení obvazu postupujte vždy asepticky.

Výměna krytí

Na začátku léčení rány by se mělo krytí ALLEVYN Ag Gentle Border průběžně kontrolovat. Při aplikaci na infikované rány je třeba infekci vyšetřit a ošetřit podle léčebného protokolu platného v daném místě. Krytí můžete nechat na místě až 7 dní, podle stavu rány a okolní kůže, dokud nebude vidět exsudát a dokud nepronikne až do vzdálenosti 1,5 cm od okraje krytí (podle toho, co nastane dříve). Přitom je třeba přihlížet k léčebným protokolům platným v daném místě.

Odstranění krytí

K odstranění krytí ALLEVYN Ag Gentle Border se zdvihne jeden roh a obvaz se pomalu sejme, až se zcela odstraní z rány.

Balení

Kód	Rozměr	Počet ks v balení
66800436	7,5 cm x 7,5 cm	10 kusů
66800437	10 cm x 10 cm	10 kusů
66800438	12,5 cm x 12,5 cm	10 kusů
66800439	17,5 cm x 17,5 cm	10 kusů

Výrobce: Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.

Obchodní značka Smith & Nephew ©Smith & Nephew datum vydání 2008



Počet
obvazů



Obvaz na rány
s přilnavým
silikonovým
povrchem




Sterilizováno
etylexidem



Na středně a
silně
exsudující
rány



Jen
k jednorázo-
vému použití

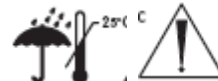

Skladujte
v suchu
(<25°C)



Pročtěte si
příbalový
leták



Nevystavujte
přímému
slunci