

SECURA™ NO-STING BARRIER FILM

Bariérový film v podobě spreje, ubrousku a tampónu.

Popis produktu

SECURA™ NO-STING BARRIER FILM je sterilní tekutý výrobek tvořící film, který obsahuje nedráždivé, rychle schnoucí rozpouštědlo.

SECURA NO-STING bariérový film pomáhá chránit intaktní nebo poškozenou kůži před podrážděním způsobeným močovou a /nebo fekální inkontinencí, trávicími šťávami, secernací exsudátem z rány, lepicími prostředky a třením/oděrem. Při aplikaci na intaktní nebo poškozenou kůži vytváří tenkou přídavnou vrstvu na upevnění drenážních hadiček, externích katétrů, na okolí stomie a přilnavého krytí. Film je bezbarvý, průhledný a má dobrou propustnost kyslíku a výparů vlhkosti.

Složení

Hexamethyldisiloxan, akrylátový kopolymer.

Indikace

SECURA NO-STING BARRIER FILM je kapalina určena k použití jako výrobek tvořící tenkou filmovou vrstvu, která po aplikaci na intaktní nebo poškozenou kůži tvoří dlouhodobou voděodolnou bariéru. Tato bariéra působí jako ochranné rozhraní mezi kůží a tělesnými odpady, tekutinami, přilnavým krytím, drenážními hadičkami, externími katétry a okolím stomie.

Výrobek lze rovněž použít na paty, lokty a další části těla, u kterých je nebezpečí podráždění následkem poškození třením nebo oděrem způsobeným vnějšími povrchy jako např. ložním prádlem nebo matrací. Výrobek lze použít u dospělých, dětí a také u kojenců od jednoho měsíce věku.

Předběžná opatření

1. Pokud se objeví jakékoliv známky podráždění (zarudnutí kůže, zánět) nebo přecitlivělost (alergické reakce), přestaňte používat a konzultujte se zdravotnickým odborníkem.
2. Nepoužívejte u pacientů se známou alergií na jakoukoliv složku výrobku.
3. Tento výrobek se nedoporučuje k použití na citlivých místech jako je okolí obličeje a očí, pokud není aplikace provedena pod dozorem zdravotnického odborníka. V případě nehody, řádně vypláchněte oči vodou.
4. Nepoužívejte na infikovanou kůži.
5. Obsah lahvičky ve spreji je sterilní do prvního použití.

Varování

SECURA NO-STING BARRIER FILM je hořlavý výrobek: používejte v dobře větraných prostorách. Vyhněte se použití v blízkosti ohně a jiných zdrojů vznícení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pouze pro vnější použití.

Návod na použití

Prosím dodržujte návod na použití, který jste obdrželi od Vašeho lékaře, sestry, nebo zdravotnického personálu. Pokud nebyly poskytnuty žádné pokyny, držte se návodu uvedeného níže:

1. Před aplikací SECURA NO-STING BARRIER FILM musí být kůže čistá a suchá.
2. **Tampón nebo ubrousek:** Naneste rovnoměrný povlak přes celou oblast, jež chcete chránit.
Sprej: Držte trysku spreje ve vzdálenosti 10-15 cm od kůže a naneste hladký, rovnoměrný povlak filmu přes celou oblast, kterou chcete chránit, přitom pohybujte lahvičkou spreje pohybem jako při zametání.
3. SECURA NO-STING BARRIER FILM zaschne během asi 30 vteřin. Pokud vynecháte část kůže, kterou jste zamýšleli pokrýt, počkejte, až již aplikovaná vrstva uschne a teprve pak naneste na vynechanou část.
4. Pro maximální ochranu můžete aplikovat druhou vrstvu SECURA NO-STING BARRIER FILM. Před použitím krytí nebo adhesivního výrobku na aplikovanou oblast nechte film zaschnout.

5. Pokud se SECURA NO-STING BARRIER FILM aplikuje na oblast se záhyby kůže nebo na jinou oblast, kde dochází ke kontaktu kůže s kůží, zajistěte separaci oblastí, která jsou v kontaktu s kůží a ponechte povlak spreje řádně zaschnout před návratem do normální polohy.
6. V případě použití adhezivních produktů je nutná opětovná aplikace filmu při každé jejich výměně, protože lepidlo může způsobit poškození nebo odstranění filmové vrstvy. Zajistěte, aby před aplikací adhezivních produktů byl SECURA NO-STING BARRIER FILM zaschlý.
7. Při použití výrobku jako ochrany před tělními tekutinami, výkalům, moči apod., nepoužívejte na kůži žádné adhezivní výrobky:
- (a) Doporučuje se opětovná aplikace SECURA NO-STING BARRIER FILM každých 24-96 hodin v závislosti na četnosti čištění.
 - (b) V extrémních případech (např. při konstantním průjmu) s velmi častým mytím může být nutná častější aplikace (např. každých 12-24 hodin).
8. Odstranění SECURA NO-STING BARRIER FILM není před opětovnou aplikací nutné. Avšak pokud je odstranění žádoucí, filmovou vrstvu lze odstranit za použití většiny zdravotnických odstraňovačů lepidel, jako např. REMOVE™, ZOFF nebo UNISOLVE™, dle návodu. Vyčistěte a vysušte místo a aplikujte čerstvou vrstvu SECURA NO-STING BARRIER FILM dle návodu výše.
9. V době, kdy se sprej nepoužívá, chraňte trysku spreje víčkem, aby nedošlo k náhodnému úniku kapaliny.

Balení výrobku

Výrobek	Popis	Počet ks v balení
66800712	1 ml /ubrousek	50
66800711	3 ml /tampón	50
66800710	28 ml /sprej	1



Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, Anglie
www.smith-nephew.com
©Smith & Nephew
Datum vystavení 03/2015
™ Obchodní značka Smith & Nephew

Vyrobeno v USA

CE 0086



Nepoužívejte,
pokud je balení
otevřené nebo
poškozené