

BACTIGRAS™

MASTNÝ TYL S ANTISEPTICKOU SLOŽKOU CHLORHEXIDINACETÁTEM 0,5%



Sterilizováno gama zářením. Na jednorázové použití. Nepoužívejte, pokud je sáček otevřen či poškozen. Skladujte v suchu (< 25°C). Chraňte před světlem.

Popis

BACTIGRAS je gáza z tylové tkaniny, impregnovaná jemným bílým parafínem a obsahující 0,5% chlorhexidinacetátu.

Výrobek je dodáván sterilní a balený jednotlivě (po jednotlivých kusech v oddělených sáčkích nebo v rolích v sáčkích, které se otevírají utržením v naznačeném zářezu).

Působení

BACTIGRAS funguje jako bariéra mezi ránou a sekundárním krytím a umožňuje volný prostup exsudátu do absorpčního sekundárního krytí.

Antiseptikum chlorhexidinacetát 0,5% se z krytí pomalu uvolňuje a dlouhodobě působí proti Gram pozitivním a Gram negativním bakteriím včetně MRSA.

Indikace

BACTIGRAS je určen pouze pro lokální léčbu. Je indikován pro širokou škálu ran s rizikem vzniku infekce, či na již infikované rány ve spojení se systémovými antibakteriálními prostředky. BACTIGRAS lze použít na:

- menší popáleniny a opařeniny
- tržné rány, odřeniny a jiné rány se ztrátou kožního krytu
- místa po transplantaci tkáně u dárců a příjemců
- bércové vředy
- diabetické defekty
- dehiscence
- na primární sutury – prevence infekce

Kontraindikace

- Nepoužívejte na ploše větší je 10% povrchu těla.
- Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti či alergie na chlorhexidin.

Předběžná opatření

Neměl by být použit v případech známé přecitlivělosti či alergie na chlorhexidin. Vzácně se může vyskytnout dermatitida, místní přecitlivělost či fotosenzitivita. Byly zaznamenány případy anafylaktické reakce na chlorhexidin, výskyt je však vzácný.

Krytí nesmí přijít do kontaktu s očima, středním uchem, meningy a mozkem.

BACTIGRAS není kompatibilní s mýdly, jinými aniontovými přípravky, jakož i s jodidem draselným.

BACTIGRAS by se neměl používat s oxidačními činidly určenými k čištění ran.

BACTIGRAS je výrobek na jedno použití. Pokud se použije u více než jednoho pacienta, hrozí křížová kontaminace nebo infekce. Otevření balení ohrožuje sterilní bariéru, proto po otevření neuchovávejte nespotřebovaný obsah pro další použití.

Návod na použití

1. Běžným postupem očistěte ránu.
2. Vyberte si vhodnou velikost obvazu a otevřete ochranný obal (nebo utrhněte konec z balení role).

3. S použitím rukavic a pinzety odstraňte vnější ochrannou papírovou vrstvu.
4. Krytí v jedné vrstvě přiložte na ránu tak, aby byl v kontaktu s povrchem rány.
5. V případě potřeby překryjte sekundárním savým krytím a upevněte krytí na ráně pomocí fixační pásky, obvazu nebo pomocí celoplošné fixace.
6. Odstranění. BACTIGRAS lze ponechat na ráně i v případě, že je nutno vyměnit sekundární krytí. Frekvence výměny obvazu se liší v závislosti na klinickému stavu, krytí je v některých případech nutno měnit i několikrát denně nebo v jiných případech stačí vyměnit krytí dvakrát týdně.
7. Pokud se krytí přilepí, jemně ho odmočte pomocí sterilního fyziologického roztoku.

Dostupnost výrobku

Kód pro objednání	Velikost	Počet ks v balení
7456	5cm x 5cm	50 ks
7457	10cm x 10cm	10 ks
66003650	10cm x 10cm	50 ks
66003661	10cm x 40cm	10 ks
7461	15cm x 20cm	10 ks
66007505	15cm x 1m	12 rolí

Výrobce

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, Anglie

™ Obchodní značky Smith & Nephew

©Smith & Nephew Datum vydání: 09/2013

Vyrobeno v Číně

www.smith-nephew.com

CE 0086

10601131 42268