



- ### Zvláštní vlastnosti

- Uvedení do provozu / Nastavení času**

- přepínání z 12 hodinového na 24 hodinové zobrazování

Nastavení časů upozornění

- Stiskněte **krátké tlačítko** režimu a na LCD displeji se zobrazí

- ### Nastavení dalších časů upozornění

Pokud jste nastavili první čas upozornění, tak pro nastavení dalšího času upozornění stiskněte znovu **krátce** tlačítko režimu (na LCD displeji objeví **1:1:2**), poté znovu stiskněte tlačítko režimu **dokud** displej nezačne blikat. Pomocí tlačítka pro hodiny nastavte hodiny a tlačítkem pro minuty nastavíte minuty druhého upozornění. Poté stiskněte tlačítko režimu a druhý čas upozornění je naprogramován. Tento postup můžete opakovat ještě třikrát, abyste v případě potřeby naprogramovali všech pět časů upozornění. Pomocí tlačítka režimu přebíháte až na zobrazení času.

Pomocí tlačítka režimu vyberte čas upozornění, který chcete smazat. Poté stiskněte tlačítko pro minutu a vybraný čas upozornění se smaže.

Po dosažení nastaveného času upozornění zazní 10 sekundový alarm s pípáním a vibracemi. Pokud nedojde k vypnutí, změní se alarm na rychlé pípání, která trvá 30 sekund. Pokud ani potom nedojde k vypnutí alarmu, bude rychlé pípání pokračovat dalších 20 sekund a přístroj vibruje.

Odpočítavací časovač

2000

Pomocí tlačítka pro minuty spustíte odpočítávání (symbol).

၈၇

Výměna baterií

Pokyny pro likvidaci

 Vadné přístroje resp. přístroje vyřazené z provozu po skončení jejich životnosti mohou obsahovat zbytkové materiály představující riziko pro životní prostředí. Přístroj řádně zlikvidujte, a to tak, že jej odhnete na recyklační dvůr, kde lze odložit staré elektroappliance.

Záruční lhůta

Vysvětlivky k symbolům

	odpovídá směrnicím EU specifickým pro daný produkt
	Aplikovaná část, typ BF
	Likvidace odpadu
	Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití
	Číslo šarže, měsíc (M) a rok (Y) výroby

SCALA Electronic GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95,
14532 Stahnsdorf (Germany)
www.scala-electronic.de