

schülke -†



Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kvarterních amoniových sloučenin vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických

Na citlivé
povrchy

mikroqid[®] sensitive liquid

Naše Plus

- Šetrně dezinfikuje povrchy zdravotnických prostředků
- Vhodný na citlivé povrchy
- Okamžitě k použití
- Zaručuje rychlý dezinfekční efekt - již od 1 minuty
- Pohodlně a snadno se používá
- Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst

Oblast použití

mikroqid[®] sensitive liquid se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodný pro dezinfekci povrchů citlivých na alkohol. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Plastové a akrylátové povrchy
- UZV sondy
- Klávesnice

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV/ Vaccinia (HIV/ HBV/ HCV) / Noro / Rota / Polyoma.

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

mikroqid[®] sensitive liquid se neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte působit po expoziční dobu požadované mikrobiologické účinnosti. Případně

přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou.

CE 0297



mikrozid[®] sensitive liquid

Složení

100 g roztoku mikrozid[®] sensitive liquid obsahuje následující aktivní látky:

- 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy
- 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, didecyldimethylammonium chlorid
- 0,26 g Kvarterní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl [(ethylphenyl)methyl]dimehtyl, chloridy

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	nestanoveno
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	6 - 8 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	Nevztahuje se



Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh.

Doba expirace: 60 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Mikrozid sensitive liquid 1 l	10/Karton	165715
Mikrozid sensitive liquid 5 l	1/Kanistr	109193

Související přípravky

- desprej[®] sensitive
- mikrozid[®] AF liquid

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schülke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com