



---

**ALFA VITA, s.r.o.**

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 15735.*

Návod na použití zdravotnického prostředku/ podklad pro registraci

Název výrobku: Výplachová stříkačka Janette 150ml

Návod na použití:

„Výplachová stříkačka slouží k odsávání tekutin nebo k výplachům. Při nasouvání pístu s těsněním do válce je třeba píst nasouvat pod úhlem cca 20 stupňů, ve vzdálenosti 1/3 píst vyrovnat do vodorovné polohy. Dodává se v nesterilním stavu. Před nasunutím pístu do válce potřete gumový kroužek silikonovým olejem. Po použití stříkačku důkladně vypláchněte proudem čisté vody, nebo plynem /Etylenoxid/ nebo parami 0,5% roztoku Persterilu.“