

# RYCHLÁ DEZINFEKCE POVRCHŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH POVRCHŮ

## Incidin™ Liquid

Dezinfekční spray na bázi alkoholu k přímému použití  
pro aplikaci postříkem

Neředěný přípravek je určen  
k přímému použití na plochy.  
Kombinuje velmi rychlé působení za  
krátkou dobu a snadnou manipulaci.  
Receptura přípravku umožňuje rychlé  
zasychání na ošetřených plochách,  
kde nezanechává zbytková rezidua.

Navíc tento přípravek nabízí vysokou  
míru spolehlivosti pro uživatele díky  
širokému spektru účinnosti včetně  
působení proti TBC a Norovirům.

Incidin Liquid navíc nabízí:

- ▲ Působí v krátké době
- ▲ Receptura neobsahuje aldehydy
- ▲ Příjemná parfemace
- ▲ Testováním doložená kompatibilita  
se systémem utěrek Incidin Dry Wipes



# Incidin™ Liquid

Dezinfekční spray na bázi alkoholu k přímému použití pro aplikaci na povrchy zdravotnických prostředků postříkem

## Proč používat Incidin™ Liquid?

### ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI ZA KRÁTKOU DOBU PŮSOBENÍ

Přípravek nabízí široké spektrum účinnosti proti mikroorganismům během krátké doby působení. Incidin Liquid je doporučován na odděleních intenzivní péče a všude tam, kde hrozí nebezpečí infekce. Podrobnosti k účinnosti najdete v níže uvedené tabulce.

### SPOLEHLIVÉ POUŽITÍ

Přípravek se neředí a je připraven k okamžitému použití pro dezinfekci materiálů odolných vůči působení alkoholu. Incidin Liquid představuje jistotu při dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků a ostatních zdravotnických povrchů.

### BEZ ALDEHYDŮ A BEZ BARVIV

Receptura přípravku neobsahuje aldehydy a ani barviva. Přípravek má příjemnou vůni, produkt je praktický a spolehlivý.



Incidin Liquid  
láhev 1 l

Incidin Liquid  
5L kanystr

## VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTŮ

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST NEŘEDĚNÉHO ROZTOKU	DOBA PŮSOBENÍ
Dezinfekce povrchů dle metodiky VAH s a bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - kvasinky, tuberkulocidní) - čisté i nečisté podmínky	5 min
Rychlá dezinfekce dle metodiky DGHM 2001 bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - kvasinky) - čisté i nečisté podmínky	1 min
EN 13727 (baktericidní) - čisté i nečisté podmínky	1 min
EN 13624 (fungicidní - kvasinky) - čisté i nečisté podmínky	1 min
EN 14348 (tuberkulocidní) - čisté i nečisté podmínky	1 min
Účinek proti obaleným virům (vč. HIV, HBV, HCV)* dle doporučení RKI 1/2004	30 sec
Adeno*	1 min
Rota*	30 sec
Papova*	10 min
Noro*	10 min

\* DVV 2008

CE 0297

### ECOLAB HYGIENE S.R.O.

Hlinky 118  
603 00 Brno  
Česká republika  
tel.: +420 543 518 247  
www.ecolab.com

### ECOLAB HEADQUARTERS:

ECOLAB EUROPE GMBH  
Richtistrasse 7  
8304 Wallisellen  
Switzerland  
+41 (0) 44 877 2001  
www.ecolab.com



### ECOLAB

DEUTSCHLAND GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany  
+41 (0) 2173 599 0  
www.de.ecolab.eu

# RYCHLÝ ÚČINNÝ SNADNÝ

## OBLAST POUŽITÍ

Incidin Liquid je přípravek k okamžité dezinfekci materiálů odolných vůči působení alkoholu určený pro ošetření povrchů zdravotnických prostředků a ostatních zdravotnických povrchů.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Neředěný přípravek aplikujte s pomocí utěrky z netkané textilie, rozetřete jej na plochách odolných vůči působení alkoholu a nechte působit do zaschnutí. Při aplikaci postříkem dodržujte vzdálenost asi 30 cm od ošetřovaného povrchu (40 ml/ m<sup>2</sup>) a pak nechte přípravek zaschnout.

## SLOŽENÍ

100 g roztoku obsahuje následující účinné látky: 35 g 2-propanolu, 25 g 1-propanolu

## BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	MNOŽSTVÍ KUSŮ V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
Incidin Liquid SPRAY láhev 600 ml s aplikátorem	12	3086930
Incidin Liquid láhev 1 l	12	3042450
Incidin Liquid kanystr 5 l	5 l	3042470

## SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě při teplotách do 25 °C, mimo přímé sluneční světlo.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:



Signální slovo: Varování  
H226 Hořlavá kapalina a páry.  
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.  
Před použitím si vždy přečtěte údaje na etiketě a připojené informace o přípravku. Podrobné informace pro bezpečné nakládání s přípravkem viz bezpečnostní list.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

2017 / 017 APPR. 2017.11.21.

**ECOLAB®**