

**ECOLAB®**

# Incidin® OxyDes



## **CZ** Kapalný koncentrovaný prípravok k dezinfekcii zdravotníckych prostriedkú a povrchú ve zdravotníctví

Účinný proti baktériám, mikroskopickým kvasinkovým houbám a obaleným vírusom (vc. HBV, HCV, HIV). 100 g prípravku obsahuje: 10 g peroxidu vodíku a 7,5 g alkylbenzyl-dimethylammonium-chloridy. **Návod k použiti:** reďením koncentrátu ve studené vode (max. 30°C) pripravte roztok o požadovanej koncentrácii. Pracovní roztok aplikujte standardním postupem na povrchy, zdravotnícké prostriedky (např. setřete na vlhko) a ponechte působit po předepsanou dobu. Dbejte na dostatečné a rovnoměrné nanesení. Před použitím čtěte přiložené pokyny a bezpečnostní list. Skladujte a přepravujte v originálním obalu, v suchu, temnu a chladu (< 25°C). Koncentrát nevypouštějte do odpadních vod. Prázdné, čisté a uzavřené obaly předejte oprávněně osobě k zneškodnění. Zbytky přípravku: viz bezpečnostní list. **Pouze pro profesionální použití.**

## **SK** Koncentrovaný, kvapalný prípravok na dezinfekciu zdravotníckych prostriedkov a povrchov v zdravotníctve.

Účinný proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom (vrátane HIV, HBV, HCV). Obsah účinných látok v 100 g prípravku: 10 g peroxid vodíka, 7,5 g alkyl(benzyl)dimetyla-

mónium-chloridy. **Návod na použitie:** Pripravte pracovný roztok s požadovanou koncentraciou s vodou (max. 30°C). Standardným spôsobom naneste na dezinfikované povrchy a zdravotnícke prostriedky a nechajte pôsobiť predpísaný čas. **Len pre profesionálne použitie.**

Výsledky mikrobiologických zkoušek / Výsledky mikrobiologických testov	Konc.		
<b>EN 13624</b> (účinnosť proti kvasinkám / účinok proti kvasinkám) <b>(clean &amp; dirty conditions)</b>	1,0 %	10 ml/L	15 min
<b>EN 13727</b> (baktericidní / baktericidny účinok) <b>(clean &amp; dirty conditions)</b>	1,0 %	10 ml/L	15 min
Účinný proti obaleným vírusom (vc. HBV, HCV, HIV) dle doporučení RKI 01/2004 / Účinný proti obaleným vírusom (vrátane HIV, HBV, HCV) podľa RKI (Robert Koch Inštitút) odporúčania 01/2004	1,0 %	10 ml/L	15 min

**6 L** **3051800** 4 **CE 0297**

3051800F/18SEP/14/EA

