

Společnost Catell doporučuje, aby výrobek vyzkoušel a nasadil licencovaný nebo jinak kvalifikovaný zdravotnický pracovník. Uživatelé s cukrovkou, citlivou pokožkou, známými kontaktními alergiemi, zhoršenou citlivostí nebo špatným krevním oběhem musí být obzvláště pozorní a při používání ortézy kontrolovat, zda nedochází k otlakům, odřeninám nebo zvýšeným otokům. Ošetření páskou může být kontraindikováno při určitých stavech, např. probíhající infekci, nádorovém onemocnění, hluboké žilní trombóze a periferní neuropatii - v případě nejistoty se poraďte s lékařem. Vždy zkontrolujte níže uvedený obsah materiálu. V případě dotazů týkajících se výrobku se obraťte na svého lékaře nebo na společnost Catell.

Oblast použití

Kinesio tape lze použít například k úlevě, zmírnění bolesti, stabilizaci nebo za účelem snížení otoku. Používejte na čistou a suchou pokožku. Aplikujte s nepatrným nebo žádným natažením. Před aplikací sval nebo kloub protáhněte. Při jakýchkoli známkách zarudnutí, svědění nebo jiných kožních potíží pásku odstraňte a kontaktujte dodavatele pásky.



Materiál

Bavlna, spandex, akrylové lepidlo. Výrobek neobsahuje latex.

Velikost

Role 5 cm x 5 m

Tento přípravek je určen pouze pro jednoho pacienta.

Recyklace

Třídte podle místních předpisů.

Tento přístroj splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích 2017:745, třída výrobků 1.