

# NÁVOD K POUŽITÍ

OPĚRADLO POD ZÁDA

# 5407



CE

## POUŽITÍ

Opěradlo pod záda tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen využít standardně vybavené lůžko. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony a zároveň eliminuje možné riziko úrazu při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

## POPIS

Konstrukce opěradla se skládá ze dvou částí - rámu, který je vyroben z povrchově upravených kovových trubek vysoké pevnosti a látkové zádové opěry s vyměkčenou opěrkou pro hlavu. Konstrukce rámu umožňuje nastavit opěrku zad do pěti poloh.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry opěrky zad: 55x59 cm

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním opěradla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním opěradla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci nebo skládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Zkontrolujte vždy správné a rovnoměrné ukotvení zádové opěrky!

Polohování vždy provádějte bez pacienta !

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části opěradla., tj. rám s opěrkou zad a hlavy.

## NASTAVENÍ SKLONU OPĚRY:

Pro nastavení požadovaného úhlu opěrky zad umístěte brázdičku (A) do jedné z pěti možných zářezů.



**ÚDRŽBA**

Opěradlo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

