


# NÁVOD K POUŽITÍ

MADLO ZÁCHYTNÉ

# 567, 568, 569

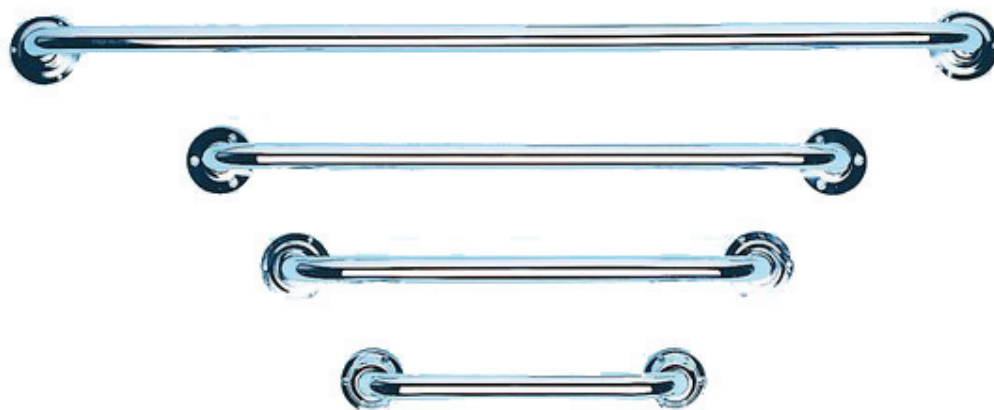

CE

## **POUŽITÍ**

Záchytné madlo tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci použít standardní vanu, sprchový kout, toaletu apod.. Madla usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech a zvyšuje vlastní soběstačnost.

## **POPIS**

Madlo je vyrobeno z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti a na obou stranách je zakončeno hlavicemi, které slouží pro uchycení madla do nosné konstrukce. Barevné provedení chrom (typ 567, 569) nebo bílé (typ 568). Madlo 569 je navíc vybaveno protiskluzovou úpravou.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Délka

567 A, 568 A, 569 A: 30,5 cm

567 B, 568 B, 569 B: 46 cm

567 C, 568 C, 569 C: 61 cm

567 D, 568 D, 569 D: 91,5 cm

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před instalací a používáním madla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním madla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Madlo musí být připevněno pouze kvalifikovaným stavebním odborníkem.

Pro větší bezpečnost doporučujeme doplnit madlo protiskluzovou podložkou a stupínkem k vaně.

## **UPEVNĚNÍ MADLA**

Madlo se připevňuje šesti šrouby do nosné konstrukce. Pro upevnění použijte samořezné šrouby o průměru 3,5 mm a hmoždinky zvolte podle druhu materiálu zdi, do které chcete upevnit madlo.

## **ÚDRŽBA**

Madlo lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění madlo řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat pevnost připevnění, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

