



ALLEVYN[◇] LIFE ALLEVYN[◇] LIFE SACRUM ALLEVYN[◇] LIFE HEEL

ALLEVYN LIFE je vícevrstvé hydrocelulární pěnové krytí s absorpční vrstvou netradičního tvaru se širokým silikonovým okrajem.

- Unikátní tvar se širokým okrajem dokonale kopíruje povrch lidského těla, zabezpečuje ideální fixaci¹⁻³
- Umožňuje pacientům sprchování, je diskrétní⁴
- Má unikátní vlastnosti pěny Allewyn, uzamyká exsudát, pod kompresní terapii krytí nepodtéká⁵
- Poskytuje tlakovou ochranu a pomáhá rozložit tlak, vhodné na oblast sacra a paty⁶
- Široké silikonové okraje zabezpečují dokonalou atraumatickou fixaci, krytí je komfortní, vysoce účinné a lze opakovaně nalepit⁷
- Lze využít jako prevenci vzniku dekubitů

Indikace

- Dekubity, diabetické defekty, bércové vředy, dehiscence
- Místa po přenesení kožních štěpů
- Na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu a s velmi nízkým rizikem infekce

Aplikace

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost vnitřního polštářku by měla lehce přesahovat okraje rány. Indikátorem k výměně je prosáklý vnitřní polštářek (viz obrázek) nebo podtečení krytí. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat s INTRASITE[◇] GEL.

Pomocný indikátor výměny zamezuje zbytečným a předčasným výměnám a tím plýtvání finančních prostředků



Nedosažený adhezivní okraj
- krytí může zůstat na ráně, je diskrétní.



Kapacita je vyčerpána z 50%
- lze zvážit výměnu krytí.



Využita kapacita ze 75%
- nutná výměna krytí.

Kód pro objednání	Rozměr	Počet ks v balení
ALLEVYN LIFE		
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	10
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	10
66801069	15,4 cm x 15,4 cm	10
66801070	21,0 cm x 21,0 cm	10
ALLEVYN LIFE HEEL		
66801304	25,0 cm x 25,2 cm	5
ALLEVYN LIFE SACRUM		
66801306	17,2 cm x 17,5 cm	10
66801307	21,6 cm x 23,0 cm	10

Zdroje:

1. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. MepilexTM Border. 2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 021 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. BiatainTM Silicone. 3. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010. 4. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 5. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 6. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone. 7. Smith & Nephew report HVT 050, Results from an open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S and Smith G. November 2008.



ALLEVYN[◇] GENTLE
ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER
ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER LITE
ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER HEEL
ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER SACRUM



Pěnové krytí s jemnou kontaktní vrstvou potaženou gelem se silikonovým okrajem, bez okraje a speciální tvar na patu.

- Jemná vrstva gelu má přilnavé vlastnosti speciálně pro citlivou pokožku
- Optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
- Zcela atraumatické převazy, voděodolné
- Krytí lze opakovaně nalepit
- Komfortní, zmírňuje tlak na predilekční místa

Indikace

- Diabetické defekty, dekubity, bérkové vředy, dehiscence
- Místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
- Na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu v granulační a epitalizační fázi

Aplikace

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí cca 1 cm přesahovalo přes okraje rány. U krytí bez adhezivního okraje, krytí fixujte filmovým krytím OPSITE[°] FLEXIFIX[°], náplastí nebo obvazem. Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn je cca 3-4 dny nebo při podtečení. Ránu hodnotěte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

Výhody

- Jemná vrstva gelu má přilnavé vlastnosti speciálně pro citlivou pokožku
- Optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
- Zcela atraumatické převazy, voděodolné
- Krytí lze opakovaně nalepit

Kód pro objednání	Rozměr	Počet ks v balení
ALLEVYN GENTLE		
66800247	5,0 cm x 5,0 cm	10
66800248	10,0 cm x 10,0 cm	10
66800249	10,0 cm x 20,0 cm	10
66800250	15,0 cm x 15,0 cm	10
66800251	20,0 cm x 20,0 cm	10
ALLEVYN GENTLE BORDER		
66800269	7,5 cm x 7,5 cm	10
66800272	12,5 cm x 12,5 cm	10
66800273	17,5 cm x 17,5 cm	10
ALLEVYN GENTLE BORDER SACRUM		
66800897	16,8 cm x 17,1 cm	6
ALLEVYN GENTLE BORDER LITE		
66800833	5,0 cm x 5,0 cm	10
66800834	7,5 cm x 7,5 cm	10
66800835	10,0 cm x 10,0 cm	10
66800836	5,5 cm x 12,0 cm	10
66800837	8,0 cm x 15,0 cm	10
66800840	15,0 cm x 15,0 cm	10
ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL		
66800506	23,0 cm x 23,2 cm	5



ALLEVYN[◇] Ag GENTLE

ALLEVYN[◇] Ag GENTLE BORDER

Pěnové krytí s integrovanými ionty stříbra v provedení se silikonovým okrajem a bez silikonového okraje.

Kontaktní vrstva je pokryta jemnou vrstvou přilnavého gelu.

- Jemná vrstva gelu a mírné přilnavé vlastnosti připravené speciálně pro citlivou pokožku
- Rychlé a trvanlivé antibakteriální účinky
- Účinný proti širokému spektru patogenů
- Optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
- Zcela atraumatické převazy, voděodolné
- Krytí lze opakovaně nalepit

Indikace

- Infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem infekce s křehkým okolím rány
- Diabetické defekty, dekubity, bérkové vředy, dehiscence
- Místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
- Na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

Aplikace

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí cca 1 cm přesahovalo přes okraje rány. U krytí bez adhezivního okraje, krytí fixujte filmovým krytím OPSITE[®] FLEXIFIX[®], náplastí nebo obvazem. Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn je co 3-4 dny nebo při podtečení. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat s INTRASITE[®] GEL.

Kód pro objednání	Rozměr	Počet ks v balení
ALLEVYN Ag GENTLE		
66800440	5,0 cm x 5,0 cm	10
66800441	10,0 cm x 10,0 cm	10
66800442	10,0 cm x 20,0 cm	10
66800443	15,0 cm x 15,0 cm	10
66800444	20,0 cm x 20,0 cm	10
ALLEVYN Ag GENTLE BORDER		
66800436	7,5 cm x 7,5 cm	10
66800437	10,0 cm x 10,0 cm	10
66800438	12,5 cm x 12,5 cm	10
66800439	17,5 cm x 17,5 cm	10

ALLEVYN[◇] Ag NON-ADHESIVE
ALLEVYN[◇] Ag ADHESIVE
ALLEVYN[◇] Ag SACRUM
ALLEVYN[◇] Ag HEEL



Pěnové krytí s obsahem iontového stříbra. (1,99 mg/cm³)

- Optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
- Antibakteriální efekt, snižuje bakteriální zátěž a odstraňuje tak překážky v hojení rány
- Široké spektrum působení proti celé řadě patogenů¹
- Snadná aplikace
- Spolehlivá ochrana vůči bakteriím, voděodolné
- Nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
- Adhezivní okraj potažený silikonem

Indikace

- Infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem infekce
- Diabetické defekty, dekubity, bérkové vředy, dehiscence
- Místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
- Na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

Aplikace

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí cca 1 cm přesahovalo přes okraje rány. U krytí bez adhezivního okraje, krytí fixujte filmovým krytím OPSITE[®] FLEXIFIX[®], náplastí nebo obvazem. Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn je cca 3-4 dny nebo při podtečení. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat s INTRASITE[®] GEL.

Kód pro objednání	Rozměr	Počet ks v balení
ALLEVYN Ag NON-ADHESIVE		
66800082	5,0 cm x 5,0 cm	10
66800084	10,0 cm x 10,0 cm	10
66800087	15,0 cm x 15,0 cm	10
66800090	20,0 cm x 20,0 cm	10
ALLEVYN Ag ADHESIVE		
66800072	7,5 cm x 7,5 cm	10
66800074	10 cm x 10 cm	10
66800076	12,5 cm x 12,5 cm	10
66800080	17,5 cm x 17,5 cm	10
ALLEVYN Ag SACRUM		
66800092	17,0 cm x 17,0 cm	10
66800095	22,0 cm x 22,0 cm	10
ALLEVYN Ag HEEL		
66800098	10,5 cm x 13,5 cm	5

Zdroje:

1. Udaje v archivu 0703012