

# ALLEVYN® Gentle Border Lite



Krytí ALLEVYN® z hydrocelulární pěny se silikonovým gelovým lepidlem  
Pro mírně až středně secernující rány.

### Popis

Krytí ALLEVYN Gentle Border Lite má vyspělou třívrstvou konstrukci, která kombinuje absorpční hydrocelulární polštářek vložený mezi perforovanou vrstvu silikonového gelového lepidla pro kontakt s ránou a vysoce propustnou vodotěsnou vnější fólii. Podkladová fólie přispívá k prevenci průniků tekutin a bakterií.

### Princip funkce

Vyspělá třívrstvá konstrukce krytí ALLEVYN Gentle Border Lite usnadňuje dynamické řízení tekutin zajišťující optimální vlhkost v prostředí rány, která vede k podpoře rychlejšího zavírání ran a může přispívat ke snížení rizika macerace. Povrch krytí ALLEVYN Gentle Border Lite pro kontakt s ránou je potažen jemnou silikonovou lepicí vrstvou, která zajišťuje atraumatické odstraňování při výměnách krytí. Krytí ALLEVYN Gentle Border Lite lze zvednout a přemístit bez ztráty jeho přílnavých vlastností. ALLEVYN Gentle Border Lite lze ponechat na místě bez nutnosti sekundární fixace a snadno se aplikuje i odstraňuje.

### Indikace

Péče o rány při sekundárním průběhu hojení mělkých ran s granulační tkání, chronických i akutních exsudativních ran, ran s plnou a částečnou tloušťkou, jako jsou dekubitů, vředy na nohou, diabetické vředy chodidel, infikované rány, maligní rány, chirurgické rány, popáleniny prvního a druhého stupně, dárčcovská místa, porušení kůže a fungicidní vředy. Krytí ALLEVYN Gentle Border Lite je vhodné pro použití na křehkou kůži.

### Návod k použití

1. Očistěte ránu v souladu s běžnými postupy.
2. Vyberte vhodnou velikost krytí.
3. Odstraněním přebytečné vlhkosti připravte a očistěte kůži obklopující oblast rány. Jakékoli přebytečné ochlupení je nutné odstříhat, aby se zajistilo těsné přilnutí k ráně.
4. Začněte odstraňovat ochranný materiál z krytí ALLEVYN Gentle Border Lite a upevňovat přílnavou stranu krytí ke kůži.

### Dostupnost produktu

Kód	Rozměry	Dostupnost
66800833	5 cm x 5 cm	Krabice 10 ks
66800834	7,5 cm x 7,5 cm	Krabice 10 ks
66800835	10 cm x 10 cm	Krabice 10 ks
66800836	5,5 cm x 12 cm	Krabice 10 ks
66800837	8 cm x 15 cm	Krabice 10 ks
66800840	15 cm x 15 cm	Krabice 10 ks
66800841	8 cm x 8 cm	Krabice 10 ks
66801012	10 cm x 20 cm	Krabice 10 ks
66801013	Oval 8,6 cm x 7,7 cm	Krabice 10 ks
66801014	Oval 15,2 cm x 13,1 cm	Krabice 10 ks
66801041	Multisite 8 cm x 8,4 cm	Krabice 10 ks

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN Anglie. ©Ochranné známky společnosti Smith & Nephew ©Smith & Nephew Datum vydání 02/2020.



# ALLEVYN® Gentle Border Lite



Hydrokomórkový opatrunek plankový ALLEVYN® z silikonovou vrstvou adhezivní. Odpovědní do ran z malým i umiarkowanym wysiękiem.

### Opis

Opatrunek ALLEVYN Gentle Border Lite ma zaawansowaną trójwarstwową konstrukcję, która obejmuje chłonną wkładkę hydrokomórkową umieszczoną pomiędzy perforowaną silikonową warstwą adhezyną stykającą się z raną i wysoce przepuszczalną wodoodporną folią zewnętrzną. Folia podkładowa ułatwia zapobieganie przenikaniu płynów i bakterii.

### Spособ działania

Zaawansowana trójwarstwową konstrukcją samoprzylepnego opatrunku ALLEVYN Gentle Border Lite ułatwia dynamiczne zarządzanie płynem w celu zapewnienia optymalnego wilgotnego środowiska rany, które sprzyja gojeniu i może pomóc w ograniczeniu ryzyka maceracji. Powierzchnia kontaktu z raną opatrunku ALLEVYN Gentle Border Lite jest pokryta delikatną silikonową warstwą samoprzylepną, która zapewni atraumatyczne usunięcie opatrunku podczas zmiany. Opatrunek ALLEVYN Gentle Border Lite można podnosić i zmieniać położenie bez utraty właściwości samoprzylepných. Opatrunek ALLEVYN Gentle Border Lite można pozostawić na miejscu bez konieczności dodatkowego mocowania i jest on łatwy zarówno do założenia, jak i usunięcia.

### Wskazania

Wtórne leczenie ran w przypadku ran płytkich, ziarninowych, ran przewlekłych i ostrych wysiękowych, ran o pełnej i częściowej grubości, takich jak odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej, rany zakazane, rany złośliwe, rany pooperacyjne, oparzenia pierwszego i drugiego stopnia, miejsca pobrania, rozdrarcia skóry i wrzody z zakażeniem grzybiczym. Opatrunek ALLEVYN Gentle Border Lite jest odpowiedni do stosowania na delikatnej skórze.

### Instrukcja używania

1. Oczyszcz ranę zgodnie ze zwykłymi procedurami.
2. Wybrać odpowiednią wielkość opatrunku.
3. Przygotować i oczyścić skórę otaczającą powierzchnię rany, usuwając nadmiar wilgoci. Nadmiar włosów należy przyciąć, aby zapewnić ściśle przyleganie opatrunku do rany.
4. Rozpocząć usuwanie warstwy ochronnej z opatrunku ALLEVYN Gentle Border Lite i zamocować stroną samoprzylepną opatrunku do skóry.

### Dostępność produktu

Kod	Wymiary	Dostępność
66800833	5 cm x 5 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800834	7,5 cm x 7,5 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800835	10 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800836	5,5 cm x 12 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800837	8 cm x 15 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800840	15 cm x 15 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66800841	8 cm x 8 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66801012	10 cm x 20 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66801013	Owalny 8,6 cm x 7,7 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66801014	Owalny 15,2 cm x 13,1 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk
66801041	Multisite 8 cm x 8,4 cm	Kartonik zawiera 10 sztuk

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN, Anglia. ©Znaki towarowe firmy Smith & Nephew ©Smith & Nephew Data wydania 02/2020.



5. Wygładzić opatrunek na ranie, usuwając pozostały materiał ochronny i upewnić się, że opatrunek przylega do rany.
6. Opatrunek ALLEVYN Gentle Border Lite można ciąć, zwłaszcza w celu założenia opatrunku na pięcie, kciok i w innych niewygodnych miejscach. Podczas cięcia opatrunku należy zawsze stosować aseptyczną technikę. Należy się upewnić, że odsonięte obszary pianki są zakryte odpowiednim opatrunkiem foliowym, uważając przy tym, aby nie zakryć całego opatrunku.
7. Opatrunek ALLEVYN Gentle Border Lite może być stosowany w połączeniu z żelem INTRASITE® Gel w przypadku ran z tkanką martwiczą lub martwicą rozprzyna.

### Częstość zmian

Na wczesnych etapach leczenia rany opatrunki ALLEVYN Gentle Border Lite należy sprawdzać często. W przypadku stosowania produktu na zakażone rany zakazanie należy kontrolować i leczyć zgodnie z lokalnym protokołem klinicznym. Opatrunki można pozostawić na miejscu do 7 dni w zależności od stanu rany i otaczającej ją skóry lub do czasu, gdy wysięk będzie widoczny i zbliży się na odległość do 0,5 cm od krawędzi opatrunku, w zależności od tego, które z nich nastąpi wcześniej. Należy również brać pod uwagę lokalne protokoły.

### Zdejmnowanie opatrunku

Aby usunąć opatrunek ALLEVYN Gentle Border Lite, należy podnieść jedną krawędź opatrunku i powoli odrywać ją aż do całkowitego usunięcia z rany.

### Środki ostrożności

Nie stosować opatrunku ALLEVYN Gentle Border Lite ze środkami utleniającymi, takimi jak roztwory podchlorynu (np. EUSOL) lub nadlunek wodoru, ponieważ mogą one spowodować rozkład chłonnego opatrunku poliuretanowego. W przypadku pojawienia się zaczerwienienia lub uczulenia, przerwać stosowanie. Opatrunku ALLEVYN Gentle Border Lite nie należy stosować w profilaktyce odleżyn. Opatrunek ALLEVYN Gentle Border Lite jest produktem do jednorazowego użycia. W przypadku stosowania u więcej niż jednego pacjenta może dojść do skażenia krzyżowego lub zakażenia. Otwarcie opakowania opatrunku narusza sterylną barierę. Niewykorzystane resztki opatrunków należy usunąć. Skala na torbie opakowania służy jedynie jako wskazówka i ma na celu pomoc w wyborze opatrunku. Należy uważać, aby uniknąć skażenia krzyżowego.