


# ALLEVYN® LIFE Heel

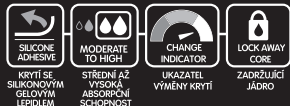

KRYTÍ SE SILIKONOVÝM GELOVÝM EPILÉM  
STŘEDNĚ AZ VYSOKÁ ABSORPČNÍ SCHOPNOST  
UKAZATEL ZADRŽUJÍCÍ VÝMĚNY KRYTÍ  
ZAJEZTVENÉ JÁDRO

CZ



## Popis

ALLEVYN® LIFE Heel je krytí se silikonovým gelovým lepídem, které zajišťuje optimální vlně prostředí pro podporu hojení středně a výsoce secernujících ran. Absorpční polštářek má pěnovou vrstvu a zadržující jádro vyrobené ze super savého materiálu. Střední část je obalena maskovací vrstvou pro skrytí exsudátu. Silikonová adhezivní vrstva je šetrná i vůči křehké kůži a usnadňuje aplikaci, opětovné přilepení i odstranění. Prodyšný vnější film přispívá k ochraně před bakteriální kontaminací a je odolný vůči sprchování, krytí se však nesmí ponořit do vody.

## Učrčené použití

- Péče o rány při sekundárním průběhu hojení mělkých ran s granulací tkání, chronických i akutních secernujících ran s plnou a částečnou tloušťkou včetně:
  - dekubitů,
  - vrředů na nohou,
  - diabetických vrředů chodidel,
  - chirurgických ran,
  - popálenin prvního a druhého stupně,
  - dárcovských míst,
  - porušení kůže,
  - linguinálních vrředů.

Lze použít ve spojení s INTRASITE® GEL pro neortrické nebo olupující se rány.  
2. Prevence dekubitů na neporušené kůži jako součást protokolu prevence dekubitů.

Další informace naleznete na adrese:  
[www.allevynlife.com](http://www.allevynlife.com) a [www.allevyn.com](http://www.allevyn.com)

## Návod k použití

ALLEVYN LIFE Heel je určen pro použití u ran v členitých oblastech, například na patách a loktech. Vyberte vhodnou velikost krytí a zjistěte, aby absorpční polštářek pokrýval celou ránu nebo chráněnou oblast. Měřtko na sáčku je pouze orientační. Vyčistěte místo aplikace. Zajistěte, aby okolní kůže byla čistá, suchá a zbavená nadbytečného ochlupení.



- Odstraňte střední krycí vrstvu a přilepte adhezivní stranu krytí k zadní části kotníku.
- Odstraňte jednu krycí vrstvu a přilepte horní chlopeň ke kotníku. Uhladte celou plochu. Odstraňte zbývající krycí vrstvu a zakryjte opačnou stranu kotníku a krytí vyhladte. Krytí nenapínejte.
- Odstraňte zbývající krycí vrstvy na každé straně spodní části krytí. Zvedněte odstraněnou část krytí pod chodidlem.
- Zajistěte krytí překrytím chlopi. Vyhlaďte všechny záhyby.

**Pozorování:** Pokud se používá k prevenci dekubitů, kůži často kontrolujte a zjišťujte, zda není poškozena tlakem. Za tím účelem lze zvednout jeden roh krytí, provést kontrolu a krytí znovu přilepit.  
**Odstanění:** Zvedněte jeden roh a krytí pomalu sloupávejte, dokud nebude zcela odstraněno.

## Četnost převazů

Během prvních tří dnů léčby krytí často kontrolujte. Krytí lze ponechat na místě až 7 dní, s výjimkou sakrální oblasti, kde lze obvazy ponechat na místě až 5 dní. Krytí by se měla měnit v závislosti na stavu rány a okolní kůže nebo tetady, když exsudát pokrývá 75 % ukazatele převazu. Zvažte provedení převazu, pokud exsudát pokrývá více než 50 % ukazatele převazu. Níže uvedený diagram slouží pouze jako vodítko a rozhodnutí o okamžiku převazu musí záviset na klinickém posouzení a místních protokolech pod vedením zdravotnického pracovníka.



## Dostupnost produktu

Kód	Rozměry	Dostupnost
66801304	Krytí na paty 25 cm x 25,2 cm	Krabice 5 ks
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	Krabice 10 ks
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	Krabice 10 ks
66801069	15,4 cm x 15,4 cm	Krabice 10 ks
66801070	21 cm x 21 cm	Krabice 10 ks
66801306	Krytí na kříž 17,2 cm x 17,5 cm	Krabice 10 ks
66801307	Krytí na kříž 21,6 cm x 23 cm	Krabice 10 ks




Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglie.  
\*Ochranné známky společnosti Smith & Nephew ©Smith & Nephew Datum vydání 03/2020



Sterilizováno ethylenoxidem  
Pokud je obal otevřený či poškozený, nepoužívejte  
Nepoužívejte opakovaně  
Nahledněte do návodu k použití  
Skládujte na suchém místě (do 25 °C/77 °F)  
Upozornění  
Chraňte před slunečním zářením  
Zelený bod

# ALLEVYN® LIFE Heel

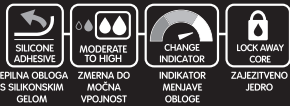

LEPILNA OBLOGA S SILIKONSKIM GELOM  
ZMERNJA DO MOČNA VARNOST  
INDIKATOR MENJAVE OBLOGE  
ZAJEZTVENO JEDRO

SI



## Opis

ALLEVYN® LIFE Heel je lepilna obloga s silikonskim gelom, ki zagotavlja optimalno vlažno okolje ran za spodbujanje celjenja ran z zmernim in močnim izločanjem. Vpojna blazinica ima sloj iz pene in zadrževalno jedro iz izjemno vpojnega materiala. Diskrecijski sloj nad središčem je namenjen zakrivanju eksudata. Silikonski lepilni sloj je nežen tuči do občutljive kože in ga je enostavno nanesiti, premakniti in odstraniti. Zračen zunanji film pomaga preprečevati bakterijsko kontaminacijo in je vodoodporen za uporabo med prhanjem, vendar pa obloga ne sme te potopiti v vodo.

## Previdna uporaba

- Oskrbna ran s sekundarnim celjenjem, kot so plive granulacijske rane, kronične in akutne eksudativne rane ter globoke in površinske rane, ki vključujejo naslednje:
  - razjede zaradi pritiska;
  - razjede spodnjih okončin;
  - razjede diabetičnega stopala;
  - kirurške rane;
  - opekline prve in druge stopnje;
  - darovalska mesta;
  - kožne raztrganine;
  - fungoidne maligne razjede.

Pri ranah z nekrozo ali fibrinskimi oblogami se lahko pripomoček uporablja v kombinaciji z izdelkom INTRASITE® GEL.  
2. Preprečevanje razjed zaradi pritiska na nepoškodovani koži v sklopu protokola za preprečevanje razjed zaradi pritiska.

Za več informacij obiščite spletni strani:  
[www.allevynlife.com](http://www.allevynlife.com) in [www.allevyn.com](http://www.allevyn.com)

## Navodila za uporabo

Obloga ALLEVYN LIFE Heel je zasnovana za uporabo na ranah na nerodnih predelih, kot so pete in komolci. Izberite ustrezno velikost obloge, tako da poskrbite, da bo vpojna blazinica pokrila celotno rano oziroma predel, ki ju je treba zaščititi. Merilna skala na vrečki služi samo kot vodilo. Očistite mesto namestitve. Poskrbite, da je okolna koža čista, suha in brez odvečnih dlak.



- Odstanite srednico
- Odstanite en listič in prilepite listič na vsaki strani na dnu obloge. Dvignite preostali del obloge pod stopalo.
- Odstanite preostale lističe na vsaki strani na dnu obloge. Dvignite preostali del obloge pod stopalo.
- Za pritrditev obloge naj se deli prekrivajo. Pogladite robove, da odstranite morebitne gube.

**Opazovanje:** Pri uporabi za preprečevanje razjed zaradi pritiska redno pregledujte kožo glede poškodo zaradi pritiska, tako da privzdignete en vogal obloge, pregledate kožo, nato pa oblogo znova namestite.  
**Odstanitev:** Privzdignite en vogal in oblogo počasi odlepite, tako da se popolnoma odstrani.

## Pogostost menjavanja

V zgodnjih fazah zdravljenja oblogo pogosto pregledujte. Obloge lahko ostanejo nameščene do 7 dni, razen v križnem predelu, kjer jih lahko pustite nameščene do 5 dni. Obloge je treba zamenjati glede na stanje rane in okolne kože ali kadar eksudat prekrje 75 % indikatorja menjave. Razmislite o menjavi, če eksudat prekrje več kot 50 % indikatorja menjave. Spodnja shema služi samo kot vodilo, odločitev o času menjave pa mora temeljiti na klinični oceni in lokalnih protokolih pod nadzorom zdravstvenega delavca.



## Razpoložljivost izdelkov

Koda	Velikost	Razpoložljivost
66801304	Obloga za peto 25 cm x 25,2 cm	5 v skatli
66801067	10,3 cm x 10,3 cm	10 v skatli
66801068	12,9 cm x 12,9 cm	10 v skatli
66801069	15,4 cm x 15,4 cm	10 v skatli
66801070	21 cm x 21 cm	10 v skatli
66801306	Obloga za križ 17,2 cm x 17,5 cm	10 v skatli
66801307	Obloga za križ 21,6 cm x 23 cm	10 v skatli



Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglija.  
\*Blagovne znamke družbe Smith & Nephew ©Smith & Nephew Datum izdaje 03/2020



Sterilizirano z etilenoksidom  
Ne uporabljajte, če je ovojnina odprta ali poškodovana  
Ni za ponovno uporabo  
Glejte navodila za uporabo  
Hranite v suhem prostoru (pri manj kot 25 °C/77 °F)  
Pozor  
Zaščitite pred sončno svetlobo  
Zelena pika