

schülke -†



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aldehydů a KAS, určený pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných a povrchů

Také pro
strojové čištění

desam® GK

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Výborná materiálová snášenlivost
- Vhodný pro ruční i strojovou dezinfekci
- Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

Oblast použití

desam® GK je určený k manuální dezinfekci i strojovému čištění všech vodovzdorných a omyvatelných ploch a předmětů v oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygieně, obecné hygieně, v institucích a také v potravinářství, stravovacích provozech a ve veterinární praxi. Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, plasty, pryž a akryláty.

Účinnost

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desam® GK se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě (20-25 °C). K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Nemíchejte s žádnými jinými čistícími či dezinfekčními přípravky, zvláště na bázi aminů či peroxidů. Povrchy, které po

dezinfekci přichází do styku s potravinami, opláchněte řádně vodou.



Složení

100 g přípravku **desam[®] GK** obsahuje následující aktivní látky:

- 6 g Glyoxal
- 3,5 g Glutaraldehyd
- 2,3 g Kvarterní amonné sloučeniny, Benzyl C-12-16-alkyldimethyl, chloridy

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neskladujte na přímém slunečním světle a společně s hořlavými materiály. Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neskladujte na přímém slunečním světle a společně s hořlavými materiály. Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam gk 1 l	12/Karton	70000205
Desam gk 5 kg	1/Kanistr	70000204



Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schulke.com