

## Návod k použití

Společnost Catell doporučuje, aby výrobek vyzkoušel a nasadil licencovaný nebo jinak vyškolený zdravotnický personál. Uživatelé s cukrovkou, citlivou pokožkou, známými kontaktními alergiemi, sníženou citlivostí nebo špatným krevním oběhem by měli být během používání obzvláště opatrní, aby nedocházelo k otlakům, odřeninám nebo zvýšeným otokům.

Léčba kompresí může být kontraindikována při určitých stavech, např. při probíhající infekci/zánětu, srdečních potížích, nádorových onemocněních, onemocnění ledvin a jater a periferní neuropatii - v případě pochybností se poraďte s lékařem. Vždy zkontrolujte níže uvedený obsah materiálu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se výrobku, obraťte se na svého lékaře, montéra nebo na společnost Catell.

MODEL	Kompresní třída	Číslo produktu
Kompresní rukavice ¾ prsty	1-2 (15-25 mmHg)	5050
Kompresní rukavice plné prsty	1-2 (15-25 mmHg)	6050
EDEMA lehká komprese ¾ prsty	1-2 (15-25 mmHg)	7050, 7051
EDEMA lehká komprese plné prsty	1-2 (15-25 mmHg)	7150, 7151
EDEMA lehká komprese, dlouhé, plné prsty	1-2 (15-25 mmHg)	7160
EDEMA větší komprese ¾ prsty	2 (23-32 mmHg)	8050, 8051
EDEMA větší komprese plné prsty	2 (23-32 mmHg)	8150, 8151

MODEL	velikost	Rozměry
Pouze EDEMA	XXS	13-15 cm
EDEMA, kompresní rukavice	XS	15-18 cm
Všechny modely	S	18-20 cm
Všechny modely	M	20-22 cm
Všechny modely	L	22-24 cm
Pouze EDEMA	XL	24-27 cm

\*Změřte obvod MCP kloubů. Měření je třeba považovat za orientační.

Poznámka - kompresní rukavice je k dispozici v levém/pravém provedení.

### Vlastnosti

Švy na vnější straně pro minimalizaci tlaku na citlivé body.

### Použití rukavice

- Za účelem snížení otoku, dle doporučení předepisujícího lékaře.
- Se švy směrem ven.

### Kontaktujte svého předepisujícího lékaře, pokud

Otok se zvětšuje.

Rukavice způsobuje znecitlivění. Rukavice způsobuje bolest.

### Materiál

Nylon, lycra. Neobsahuje latex.

### Pokyny pro praní

Postupujte podle níže uvedených pokynů k praní. Použijte prací sáček. Nechte uschnout ve vodorovné poloze.



Použití pro jednoho pacienta.

### Recyklace

Třídte podle místních předpisů.

Tento přístroj splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích 2017:745, třída výrobků 1.