



Ortéza na zápěstí s fixací palce S8555

- Ortéza obsahuje vyjímatelné kovové výtzuhy a nastavitelné popruhy na suchý zip pro fixaci a stabilizaci zápěstí s palcem ve správné pozici.
- Vnitřní vrstva je vyrobena z měkké bavlněné tkaniny pro větší komfort.
- Anatomický tvar je pohodlný pro každodenní nošení.
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).
- Navržena zvlášť pro pravou a levou ruku.

Ortéza Dr. Frei PRO je vhodná jako prevence před opakováním traumat kloubně-vazivového aparátu při sportovních a pohybových aktivitách. Může být použita na oslabené zápěstí nebo při zvětšené laxitě (volnosti) karpometakarpálního (kořenového) kloubu palce.

Doporučení pro použití: Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.


Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

Rozměry	Velikosti	Maximální odchylna
	UNIVERZÁLNÍ VELIKOST	
Obvod zápěstí, cm	15 - 22	± 1,0 cm




Jak správně nasadit ortézu:

Na pravou ruku:

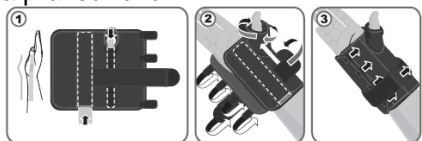

Na levou ruku:

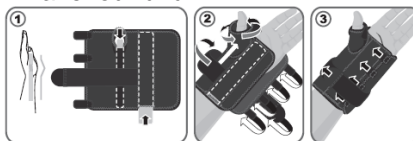

Údržba: Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění.

Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých mastí.

Složení: aeropren - 60%, polyester - 20%, bavlna - 15%, latex – 5%, kovové výtzuhy.

Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu.

Datum výroby: Uvedeno na obalu.

Velikost: Univerzální

Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,

e-mail: medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz.

Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356,

e-mail: info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.



DR. FREI IS A REGISTERED TRADEMARK.
A SWISS BRAND.



REF DFSI001_091117

