



## Bandáž na kotník, nastavitelná S7028


- „Contour design“ - nastavitelné popruhy na suchý zip pro individuální kompresi, pohodlné nošení a stabilizaci kotníku během fyzické aktivity.
- Snadné nasazování a maximální opora.
- Aeropren (zdravotně nezávadný neopren s mikroventilací) absorbuje nárazy a zajišťuje lepší prodyšnost při dlouhodobém používání.
- Otevřená špička a pata umožňují plný rozsah pohybu.
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).
- Vhodná pro levý i pravý kotník.

**Bandáž Dr. Frei PRO** je vhodná jako prevence možných zranění přetíženého nebo nestabilního kotníku při sportovních a pohybových aktivitách. Pomáhá snižovat nadměrnou plantární flexi (ohýbaní za ploskou nohu) a také inverzi (natažení vnějších vazů) a everzi kotníku (natažení vnitřních vazů) spojenou se zraněními vazů a nestabilitou kotníku. Zajišťuje fixaci a stlačení hlezenního kloubu.

**Doporučení pro použití:** Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.

**Kontraindikace:** Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

Rozměry	Velikosti	Maximální odchylka
	UNIVERZÁLNÍ VELIKOST	
Obvod kotníku, cm	16 - 31	± 1,0 cm

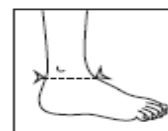

### Jak správně nasadit ortézu:

Na pravou nohu:



Na levou nohu:



**Údržba:** Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění.

**Upozornění:** Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých mastí.

**Složení:** aeropren - 60%, polyester - 20%, bavlna – 15%, latex - 5%.

**Podmínky skladování:** Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svítu.

**Datum výroby:** Uvedeno na obalu.

**Velikost:** Univerzální.

**Distributor:** medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,

e-mail: [medhaus@medhaus.cz](mailto:medhaus@medhaus.cz), [www.medhaus.cz](http://www.medhaus.cz), [www.medpack-group.cz](http://www.medpack-group.cz)

**Výrobce:** Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356,

e-mail: [info@medtex-swiss.ch](mailto:info@medtex-swiss.ch), [medpack-group.com](http://medpack-group.com), [medtex-swiss.ch](http://medtex-swiss.ch), [dr-frei.com](http://dr-frei.com) Dr. Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.