

Elastická bandáž na kotník S7035


- Poskytuje měkkou fixaci a kompresi kotníku.
- Anatomický tvar je vhodný pro každodenní použití.
- Vyrobená z prodyšného materiálu.
- Vhodná pro pravou i levou nohu.

Bandáž Dr. Frei PRO poskytuje spolehlivou podporu a ochranu nestabilního kotníku během při sportu či jiných pohybových aktivitách. Je vhodná jako prevence vazivové laxity (volnosti) či jiných zranění kotníku.

Doporučení pro použití: Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.


Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

| Rozměry | Velikosti | | | | Maximální odchylka |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|--------------------|
| | S | M | L | XL | |
| Obvod kotníku, cm | 15 - 20 | 21 - 26 | 27 - 32 | 33 - 38 | ± 1,0 cm |

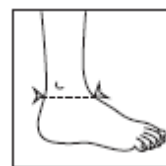


Jak správně nasadit ortézu:

Na pravou nohu:

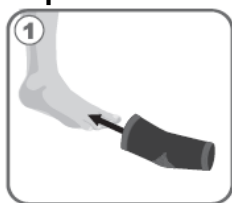

Na levou nohu:

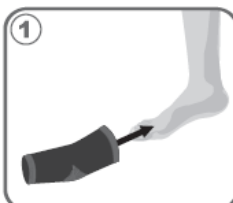

Údržba: Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění.

Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých mastí.

Složení: Kapron - 60%, latex - 30%, polyester - 10%.

Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svítu.

Datum výroby: Uvedeno na obalu.

Velikost: Uvedeno na obalu.

Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,

e-mail: medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz

Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356, e-mail:

info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.