

## Elastická bandáž na zápěstí S8503

- Poskytuje měkkou fixaci a kompresi zápěstí.
- Anatomický tvar je pohodlný pro každodenní nošení.
- Vyrobená z prodyšného materiálu roztažitelného do čtyř stran.
- Vhodná pro pravou i levou ruku.

**Bandáž Dr. Frei PRO** je vhodná jako prevence běžných dislokací a traumat zápěstí, také může být použita jako řešení přetrvávajících bolestí a mírné nestability zápěstí při sportu či jiných pohybových aktivitách.

**Doporučení pro použití:** Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.



**Kontraindikace:** Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

Rozměry	Velikosti				Maximální odchylka
	S	M	L	XL	
Obvod zápěstí, cm	14 – 16	17 – 19	20 – 22	23 - 25	± 1,0 cm




### Jak správně nasadit ortézu:

Na pravou ruku:

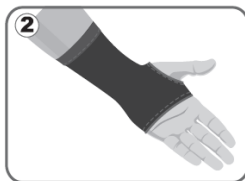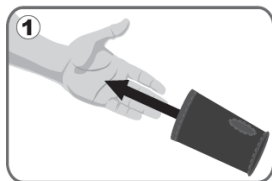

Na levou ruku:

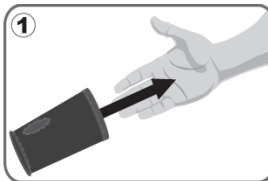

**Údržba:** Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. Nepoužívejte chemické čištění.)

**Upozornění:** Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých masť.

**Složení:** kapron - 60%, latex - 30%, polyester - 10%.

**Podmínky skladování:** Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svítu.

**Datum výroby:** Uvedeno na obalu.

**Velikost:** Uvedeno na obalu.

**Distributor:** medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,

e-mail: [medhaus@medhaus.cz](mailto:medhaus@medhaus.cz), [www.medhaus.cz](http://www.medhaus.cz), [www.medpack-group.cz](http://www.medpack-group.cz)

**Výrobce:** Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356,

e-mail: [info@medtex-swiss.ch](mailto:info@medtex-swiss.ch), [medpack-group.com](http://medpack-group.com), [medtex-swiss.ch](http://medtex-swiss.ch), [dr-frei.com](http://dr-frei.com) Dr. Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.