

## Návod k použití

Společnost Catell doporučuje, aby výrobek vyzkoušel a nasadil licencovaný nebo jinak vyškolený zdravotnický personál. Uživatelé s cukrovkou, citlivou pokožkou, známými kontaktními alergiemi, poruchami citlivosti nebo špatným krevním oběhem by měli být během používání obzvláště opatrní, aby nedocházelo k otlakům, odřeninám nebo otokům. Vždy zkontrolujte níže uvedený obsah materiálu. V případě dotazů ohledně výrobku se obraťte na svého lékaře, montéra nebo společnost Catell.

### Oblast užití

Ortéza podporuje a odlehčuje klouby CMC1 a MP palce po zranění, operaci, chronických bolestivých stavech, degeneraci kloubů nebo problémech způsobených přetížením. Ortézu lze použít také jako preventivní opatření při těžkých nebo monotónních pohybech.

### Aplikace

1. Otevřete pásky se suchým zipem a zavřete úchyt na palec odpovídající obvodu palce. Umístěte palec do ortézy podle obrázku 1.
2. Zavřete všechny pásky na suchý zip a nastavte je tak, aby ortéza pohodlně seděla. Obrázek 2
3. Pokud je ortéza opatřena dlahou, lze ji z kapsy na dlahu vyjmout a upravit tak, aby se přizpůsobila ruce uživatele. Poté je znovu vložte do kapsy.



Odřízněte přebytečné suché zipy, abyste dosáhli čistšího a úhlednějšího vzhledu. V případě potřeby suchý zip upravte. Je důležité, aby ortéza pohodlně seděla, netlačila, neodírala a nezpůsobovala stázi.

### Materiál

**Stabil:** bavlna, polyester, elastan. **Komfort:** bavlna, polyamid, polyester, elastan. **Neopren:** syntetický kaučuk, polyester, polyamid. **Soft:** polyester, viskóza, elastan, nylon.  
Všechny materiály neobsahují latex.

### Pokyny pro praní

Zavřete popruhy se suchým zipem a vyjměte dlahu, pokud ji ortéza má. Postupujte podle níže uvedených pokynů k praní. Použijte prací sáček. Nechte ortézu vyschnout.



### **Velikost:**

Velikost	Rozměr	Velikost	Rozměry	Velikost	Rozměry
XXS	10 - 12 cm	M	16 - 18 cm	XL	20 - 22 cm
XS	12 - 14 cm	L	18 - 20 cm	XXL	22 - 24 cm
S	14 - 16 cm				

\*Měření je prováděno kolem zápěstí a mělo by být považováno za orientační. Tento přípravek je určen pouze pro použití u jednoho pacienta. Pokud výrobek obsahuje neopren, doporučuje se používat jej maximálně 4 hodiny v kuse. Likvidace: Pokud má výrobek odnímatelnou lištu, odstraňte ji a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Manufacturer Catell AB