

NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRICKÝ OTVÍRÁK KONZERV

ADL 31




CE

POUŽITÍ

Elektrický otvírák konzerv tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití, díky možnosti obsluhy pouze jednou rukou, nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu má zhoršené jemnou motoriku, sníženou svalovou sílu nebo absenci horní končetiny a zhoršenou koordinaci pohybu. Elektrický otvírák usnadňuje pacientům otevření konzerv a zároveň eliminuje možné riziko úrazu při těchto úkonech a zvyšuje vlastní soběstačnost.

POPIS

Otvírák je vyroben z vysoce odolného plastu a ostří s ozubeným kolečkem z kvalitní nerezové oceli. Ergonomická rukojeť je doplněna magnetickým držákem víčka.

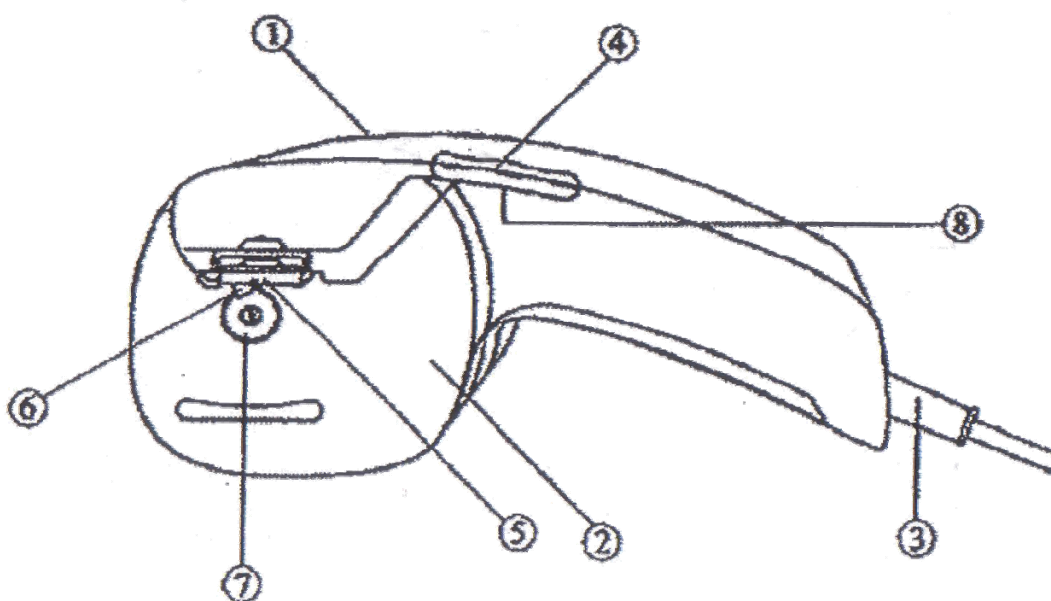

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. typový štítek | 5. magnetický držák víčka |
| 2. základna | 6. řezací čepel |
| 3. síťový kabel se zástrčkou | 7. posuvné ozubené kolečko |
| 4. spínací páčka | 8. spínač |

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry: 22 x 8.5 x 10 cm

Hmotnost: 450 g

Napětí: 230 V, 50 Hz

Příkon 25 W

Max. doba otvírání: 3 min

Spotřebič splňuje veškeré normy souhlasící s náležitým CE, jako elektromagnetická kompatibilita a nízkonapěťové směrnice, a je vyrobeno ve shodě s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním otvíráku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s otvírákem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Otvírák je určen výhradně pouze pro osobní použití. Nepoužívejte pro velkokapacitní komerční potřeby.

Otvírák nepoužívejte ve venkovním prostředí.

Vyhýbejte se blízkosti zdrojů tepla, vlhka (neponořujte do tekutin apod.) a přímého slunečního záření.

Před použitím otvíráku si vždy osušte ruce. Nikdy neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.

Pokus je otvírák vlhký nebo mokřý, nikde ho nezapojte do sítě. Je-li již připojený, ihned ho odpojte.

Při čištění nebo nepoužívání otvíráku ho vždy vypojte ze sítě (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).

Otvírák i kabel držte z dosahu dětí. Ujistěte se, že na ně nemohou dosáhnout.

Před každým použitím zkontrolujte, zda spotřebič, kabel nebo zástrčka nejsou žádným způsobem poškozeny. Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálu, otvírák nepoužívejte.

Nikdy se nesnažte otvírák sami opravit ani jakkoliv přizpůsobit, vždy kontaktujte autorizovaného prodejce.

K předejití jakémukoliv možnému nebezpečí, vždy nechte vyměnit poškozený kabel proškoleným kvalifikovaným technikem a vždy pouze za stejný typ.

Vždy používejte pouze originální náhradní díly a části dodávané autorizovaným prodejcem.

POSTUP

Zapojení otvíráku

Napětí zásuvky musí být shodné s údajem na typovém štítku spotřebiče (viz „Tech. parametry“).

Spojte zástrčku na konci kabelu otvíráku se síťovou zásuvkou (230 V/50 Hz)

Před použitím

Otvírák očistěte (viz „Údržba“).

Pokud po zapojení do sítě uslyšíte slabé cvakání, nelekejte se. Nemá to jakýkoliv vliv na funkci během otvírání.

Je-li konzerva těžší než 1000 g, je nutné si ji při otvírání přidržet druhou rukou.

Ke konzervám mající poškozené hrany, je otvírák potřeba přiložit vícekrát.

Spájené konzervy, které se normálně dají otevřít „klíčem“ je možné otevřít skrz dno, jsou li k tomu přizpůsobeny hrany.

Otevření konzervy

Je možné, že spínací páčka nebude reagovat, hned. Chvilku vyčkejte.

Otvírák je zkonstruován pro krátkodobé použití (3 min), můžete tedy otvírat maximálně tři minuty bez přerušení, po té se otvírák sám automaticky vypne. Po vychladnutí můžete otvírák opět použít.

Konzerva musí být umístěna na vodorovném místě (použití jednou rukou) nebo pevně přidržena palcem druhé ruky.

Přiložte řezací čepel (6) a ozubené posuvné kolečko (7) naproti sobě na hranu konzervy.

Palcem zmáčkněte spínací páčku (4) směrem dolů, dokud se čepel (6) nedotkne povrchu víčka. Magnetický držák (5) by měl přilnout k víčku a přidržet ho.

Je-li spínací páčka (4) zmáčknutá, aktivuje se spínač (8) a čepel propíchne a automaticky otvírá víčko konzervy. Tento proces může být kdykoliv přerušena povolením páčky (4).

Je-li víčko úplně otevřené, zvedněte palec a povolte spínací páčku (4).

Víčko je teď úplně volné a můžete ho vyndat pomocí magnetického držáku (5).

Při odstranění víčka z magnetického držáku buďte obzvláště opatrní, aby nedošlo ke zranění o ostrou hranu víčka.



ÚDRŽBA

Základnu otváraku můžete čistit jemně vlhkým hadříkem namočeným ve vodě. Nepoužívejte prostředky, které obsahují rozpouštědla a mohou způsobit mechanické narušení povrchu. Spínací páčka s čepelí a magnetickým držákem lze pro čištění sundat – odklopte ji do maximální možné polohy a zatáhněte do strany. Složte zpět obráceným postupem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrický spotřebič, nelze ošetřovat tekutinami ani ponořením do nich.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.