



neodisher® MediClean forte

Alkalický čisticí prostředek s tenzidy pro mytí termostabilních a termolabilních materiálů, tekutý koncentrát

- Hlavní oblast použití:** Strojní a ruční čištění chirurgických nástrojů včetně MIC-nástrojů, mikronástrojů, flexibilních endoskopů, anesteziologických nástrojů, kontejnerů a jiných zdravotnicko-technických potřeb.
- Charakteristika:** neodisher® MediClean forte je alkalický čisticí prostředek, který spolehlivě odstraňuje zbytky zaschlé a denaturované krve a současně je vysoce šetrný k materiálu. neodisher® MediClean forte obsahuje hydroxid draselný (KOH) a tenzidy. Tyto látky zabraňují redispozici zbytků proteinů a kromě toho snižují mezní povrchové napětí pracovního roztoku.
- Vůči pracovnímu roztoku neodisher® MediClean forte je odolná nerezová ocel, nástrojová ocel, optika, běžné umělé hmoty i anesteziologické materiály. Eloxovaný hliník je nutno předem vyzkoušet.
- Použití a dávkování:** neodisher® MediClean forte je možné používat v mycích a dezinfekčních automatech a také v ponorné a ultrazvukové lázni. Dávkování přípravku je m.j. závislé na oblasti použití a stupni znečištění materiálu.
- Pro strojní čištění nástrojů:
0,2 – 1,0 obj. % (2 - 10 ml/l při 50 – 60 °C), pro docílení pH>10 je třeba použít dávkování 5 – 10 ml/l.
- Pro mytí a závěrečný oplach doporučujeme použití demineralizované vody. Neutralizační krok je možné vynechat. Při mytí očních nástrojů doporučujeme zařadit oplach vodou před závěrečným oplachem.
- Pro strojní mytí flexibilních endoskopů: 0,5 % (5 ml/l při 35 – 55 °C, 5 min)
- Pro ruční mytí nástrojů v ponorné a v ultrazvukové lázni:
0,5 - 2 % (5 – 20 ml/l), 10 – 30 min, teplota max. 40 °C. Pracovní roztoky je nutné obnovovat nejméně jednou denně.
- Pro ruční mytí flexibilních endoskopů a příslušenství v ponorné a ultrazvukové lázni:
0,5 - 3 % (5 – 30 ml/l), 5 – 10 min, teplota max. 40 °C. Pracovní roztoky je nutné obnovovat nejméně jednou denně.
- Následně musí být roztok neodisher® MediClean forte plně odstraněn účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky.
- Před změnou přípravku je třeba vypláchnout dávkovač a přívodní hadice vodou.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm³.
Oblast pH (určena v plně demineralizované vodě, 20 °C) 2-10 ml/l: 10,4 - 10,8.
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPa.s.
Titrační faktor: 0,78 (dle speciálního návodu k titraci pro neodisher® MediClean forte).
- Složení:** < 5 % neionogenních a anionaktivních tenzidů
Další látky: enzymy
- Pokyny ke skladování:** Skladovat v chladu, avšak při teplotě nad bodem mrazu (0 – 25 °C). Při správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.