

## Infračervený čelní teploměr

SC 8271



### Infračervený čelní teploměr SC 8271

- měření teploty v délce asi 1 sekundy
- uložení 9-ti výsledků měření,
- pípnutí na konci měření,
- automatické vypnutí teploměru po měření.

Teploměr SC 8271 je infračervený čelní teploměr. Změří tělesnou teplotu během pouze jedné sekundy. Konec měření je signalizován pípnutím. Tělesná teplota se měří

na čele.

Do paměti lze uložit až devět naměřených hodnot. Pokud je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu cca. 3 sekund a zobrazí se poslední naměřená hodnota. Při každém dalším stisknutí tlačítka vyvoláte další měřené hodnoty v chronologickém pořadí. Pozice 1 v paměti znamená nejstarší naměřenou hodnotu.

