

Temperature Sensing (Foley) Catheter - TSC

Additional MRI safety instructions for TSC

Warning:

This product should never be connected to the temperature monitor or connected to a cable during an MRI procedure.

1. Foley catheter with temperature sensor should not be connected to the temperature monitoring equipment during MRI procedure.
2. Always disconnect the extension cable from the TSC during MRI procedure.
3. Don't connect any electrically conductive device or material to the catheter.
4. Position the part of the TSC that protrude out of the body of the patient and its integral cable in a straight configuration in order to avoid loops and prevent possible excessive MRI related heating.
5. MR Imaging should be performed using an MR system with static magnetic strength of 1.5-Tesla/64-MHz or 3-Tesla/128-MHz, ONLY.

Omri Mairon, CTO



Katetry s teplotním čidlem (Foley) - TSC

Dodatečné instrukce pro použití TSC

Varování:

Tento produkt nesmí být nikdy propojen s monitorem sledující teplotu nebo propojen s kabelem během vyšetření magnetickou rezonancí.

1. Foley katetr s teplotním čidlem by neměl být propojen s jakýmkoliv vybavením pro měření teploty během MR vyšetření.
2. Vždy rozpojte prodlužovací kabel od TSC během MR vyšetření.
3. Nepřipojujte žádné elektřinu vodivé zařízení či materiál ke katetru.
4. Část katetru vyčnívající z těla pacienta a integrovaný kabel musí být umístěn tak, aby nedošlo k tvorbě ok, a aby se předešlo nadměrnému zahřátí v průběhu MR vyšetření.
5. MR snímky mohou být prováděny POUZE použitím zařízením magnetické rezonance o síle magnetického pole 1,5 Tesla/64-MHz nebo 3-Tesla/128-MHz.

Omri Mairon, Technický ředitel