



NÁVOD K POUŽITÍ

StopBac CARE TREND antibakteriální náplast s polštářkem nové generace k jednorázovému ošetření drobných poranění i hlubších ran. Aktivní zóna polštářku využívá unikátních nanotechnologických řešení a obsahuje aktivní ionty stříbra. Vedle kvalitního krytí rány a jejího okolí tak poskytuje vysoce účinnou antibakteriální ochranu, tedy razantně redukuje výskyt bakterií a brání průniku vnější bakteriální infekce. Zásadním omezením rizika vzniku sepse tak náplast StopBac významně přispívá k lepšímu zhojení poranění.

Vysoce kvalitní materiály náplasti StopBac poskytují účinné a komfortní krytí rány. Náplast je šetrná k pokožce a poskytuje ideální přilnavost. Polštářek má značnou absorpční kapacitu, díky své struktuře je však dostatečně prodyšný a neuvolňuje do rány žádná vlákna. Aktivní zóna polštářku zajišťuje antibakteriální účinek po celou dobu aplikace, nezávisle potvrzený řadou laboratorních testů.

Účel použití: Jednorázové ošetření – krytí drobných poranění i hlubších, špatně se hojících ran, kde není vyžadováno sterilitní krytí.

Návod k použití: Po důkladném vyčištění případně desinfekci rány odstraňte krycí fólii a náplast nalepte na osušené postižené místo. Aktivní zóna polštářku by měla být v přímém kontaktu s poraněním, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá ochrana s maximálním antibakteriálním účinkem.

Složení: Náplast i polštářek jsou vyrobeny z netkané textilie. Polštářek náplasti je na vnější straně opatřen aktivní zónou tvořenou patentovanou antibakteriální nanovrstvou obsahující stopová množství stříbra, které efektivně působí proti bakteriím v místě poranění a tím podporuje a urychluje hojení ran. Mírná barevná změna polštářku nemá vliv na funkci výrobku.

Rozměry a balení: Antibakteriální náplast s polštářkem StopBac je vyráběna v šířce 8cm nebo 6cm a je k dispozici v řadě spotřebitelských balení (návin, jednotlivé kusy) – viz obal.